


Bruksanvisning Geemarc Amplicall 10

Ringsignalförstärkare - När telefonen ringer, avges strax en ljusblixt och en tonstöt (om den är inställd så). Detta upprepas för varje ringsignal. Tonstöten har en nivå av >95 dB(A) på ett avstånd av 1 meter från ljudkällan.

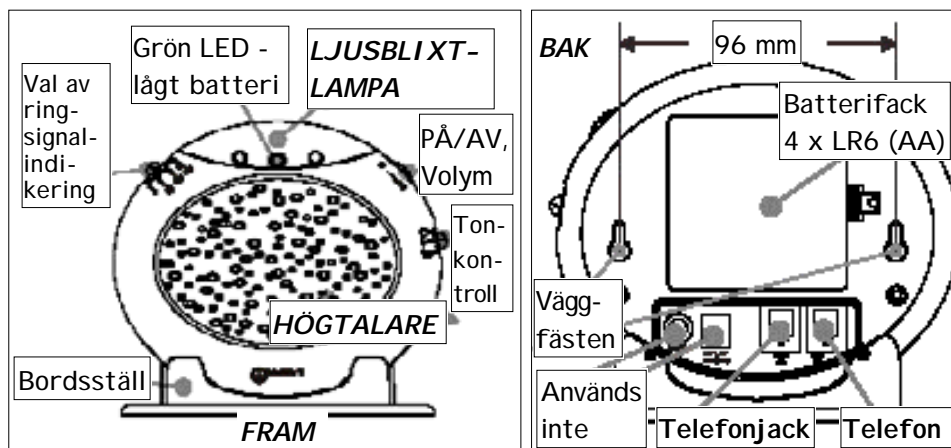

Amplicall 10 kan placeras på bord etc eller hängas på vägg.

Ansluta Amplicall 10

- Sätt i bifogade batterier, LR6. Batterifacket finns på baksidan.
- Ta bort anslutningskabeln från telefonen. Sätt i kontakten i det vänstra uttaget (anges i figuren som "Telefonjack").
- Anslut bifogat kablage (3 meter långt) till högra uttaget (anges i figuren som "Telefon"). Andra änden ansluts till telefonen.
- Sätt på bordsstället om så önskas eller montera på vägg.
- Kontrollera att du får kopplingston i telefonen. Klart!
- Du kan köpa en kortare mellankabel hos t ex Clas Ohlson, Kjell & Company, m fl. Kontakterna i båda änderna ska vara av typ modular RJ11.
- Om du vill ha längre driftstid för batterierna, kan du köpa Litiumbatterier, FR6, som ger en driftstid som är 3 - 7 gånger längre (beroende på fabrikat) än alkalinebatterier.

Använda Amplicall 10

- Sätt på Amplicall 10 med volymvredet till höger på framsidan. Ställ in max för test.
- Välj typ av signal med knappen till vänster på framsidan. Knappen har följande 4 lägen:
 - Ingen indikering
 - Ljus- och ljudsignal
 - Endast ljussignal
 - Endast ljudsignal
- Ring upp telefonen för att testa!
- Med tonkontrollen kan ljudet korrigeras avseende tonhöjd.
- Med volymvredet justeras volymen.
- Stäng inte av Amplicall 10 utom när du är borta en längre tid.

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.



Rehabmodul AB

För kommunikation med datorprogram och AKK-talapparater