


Bruksanvisning Chatter Box 10

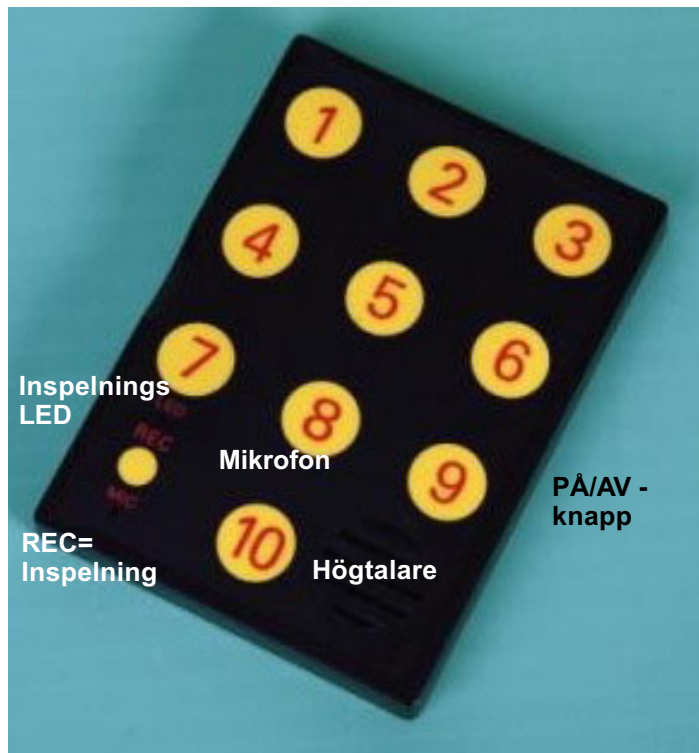

Talapparaten för inspelning och utläsning av egna meddelanden. Mycket enkel att använda för intalat träningsmaterial, minnesstöd, meddelanden, AKK, steg-för-steg instruktioner, mm.

10 meddelanden, som var och en kan vara högst 10 sekunder (totalt 1 minut och 40 sekunder).

Ett eget överlägg kan göras (140 x 100 mm) och läggas ovanpå tangentsatsen, som skyddas av en avtagbar, genomskinlig plastskiva. Vikt: 130 gram resp. format: 150 x 110 x 16 mm.

Gör ett överlägg

Klipp till ett pappersark i formatet 140 x 100 mm. Skriv/rita eller sätt på ord-/bildmaterial med anknytning till det som ska sägas. Lägg överlägget under plastskivan.

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

Spela in meddelanden &

Spela över meddelanden

- Sätt först på Chatter Box med PÅ/AV knappen, läge ON.
- Tryck på REC tangenten på framsidan samtidigt som du trycker på en meddelandeknapp. Du håller knapparna intryckta under hela inspelningen. Den röda lysdioden tänds.
- Tala in i mikrofonen. Varje ruta kan spela in ett meddelande på högst 10 sek. Inspelningsnivån är autoreglerad.
- Låt tiden gå ut (lysdioden släcks) eller avsluta inspelningen genom att släppa båda tangenterna. Fortsätt att spela in.
- Du behöver inte stänga av Chatter Box med PÅ/AV knappen, mellan användningarna, den drar mycket lite ström.

Installera/byta batterier

Batterier är isatta. När ljudet inte låter bra är det tecken på att batterierna behöver bytas. Byt alltid alla batterierna vid samma tillfälle! Batterifacket sitter på baksidan.

För att sätta i/byta batterierna, lossar du skruven och tar bort luckan (och de gamla batterierna). Sätt i två nya 1,5 volt alkaline batterier av typ LR03 / AAA. Sätt tillbaka luckan och skruva fast skruven.

Läsa upp meddelanden

Tryck på önskad tangent och inspelat meddelande läses upp. Ingen volymkontroll - anpassa därför inspelningarna till de förhållanden som de ska användas under.

Ta bort meddelanden

Följ proceduren enligt ovan, men tala inte in något meddelande!

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på grund av tryckfel.

