




MemoryPlus 319i ph

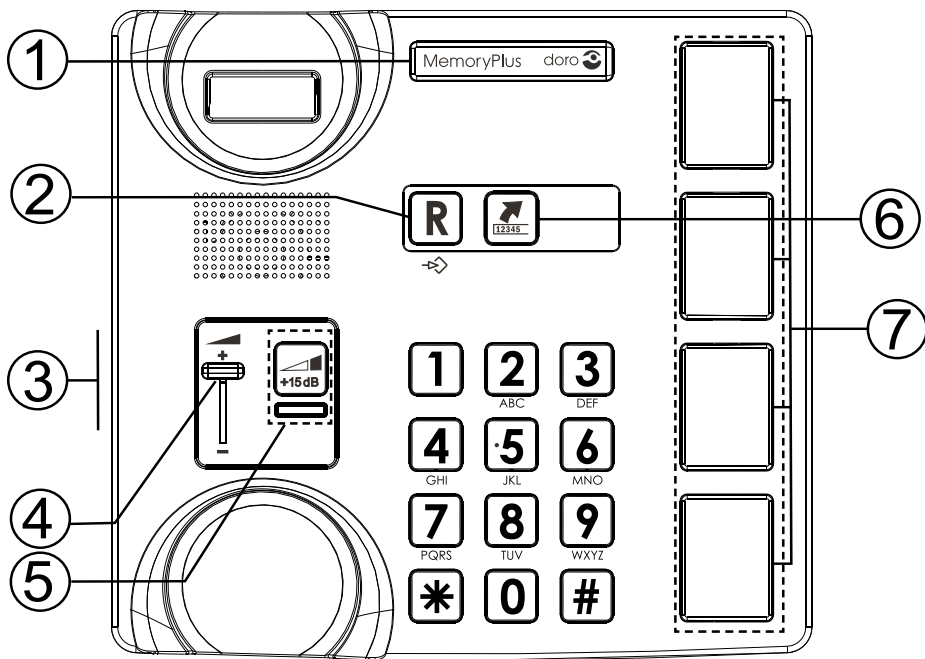

1. Ringindikator
2. R-knapp/programmering
3. Tonkontroll
4. Volymkontroll

5. Volymförstärkning
6. Återuppringning
7. Snabbval


Handhavande

Att ringa

Vanlig uppringning

1. Lyft luren.
2. Slå önskat telefonnummer.

Återuppringning

Om det var upptaget på ett telefonnummer eller om det senast slagna telefonnumret önskas ringas upp igen, lyft luren och tryck på återuppringningsknappen .

Minnen

Telefonen har 4 snabbvalsminnen.

När ett telefonnummer är lagrat i något av dessa kan uppringning ske med endast en knapptryckning. Under det genomskinliga locket på snabbvalsknapparna kan det läggas en bild eller symbol så att man enkelt kan se till vem snabbvalen går.

Uppringning med snabbval

1. Lyft luren och invänta kopplingston.
2. Välj önskat snabbval genom att trycka på motsvarande knapp.

Ljudkontroll

Denna produkt kan justera ljudet på flera sätt:

 Normal volymkontroll för luren (under luren).





Tryck på knappen (under luren) för att aktivera kraftig volymförstärkning. Lysdioden börjar lysa. Förstärkningen deaktiveras normalt efter varje samtal. Denna skyddsfunktion är ställbar, se *Teknisk information*.



Ändra frekvensomfång/ljudbilden (på vänstersidan). OBS! Fungerar endast när den kraftiga volymförstärkningen är aktiv.




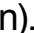
Inställningar

Inkoppling

1. Anslut telesladden till ett telejack och till uttaget  på telefonens baksida.
2. Anslut spiralsladden till luren och till uttaget  på telefonens undersida, se *Teknisk Information* (6).
3. Ett klickljud hörs när modularkontakten kommit på plats.
4. Ställ in rätt **R**-knappstid till 100, se *Teknisk Information* (4).
5. Lyft luren och kontrollera att kopplingston hörs.

Minnen

Lagra snabbval


1. Se till att omkopplaren **R**/ på telefonens undersida står i läge . Se *Teknisk Information* (5).
2. Lyft luren och tryck  (**R**) (bry dig inte om kopplingstonen).
3. Slå telefonnumret (max 16 siffror) med siffertangenterna. Tryck  (**R**).
4. Välj snabbval genom att trycka på motsvarande knapp.
5. Lagg på luren. Numret är lagrat.

Tänk på att återställa omkopplaren **R**/ på telefonens undersida till läge **R** när samtliga önskade telefonnummer är lagrade.

Om en paus önskas i telefonnumret tryck .

Teknisk Information

På telefonens undersida finns flera omkopplare.

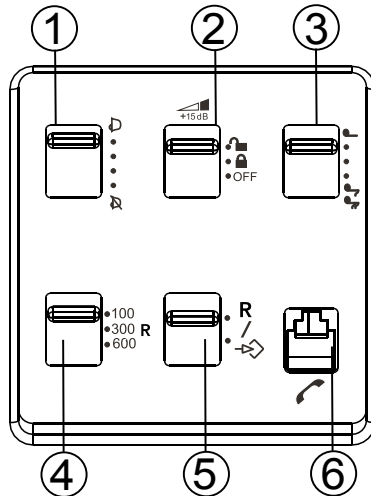

1. Ringvolym



2. Kraftig volymförstärkning (Boost)

Tryck på knappen under luren för att aktivera.



Normalinställning.

Volymförstärkningen deaktiveras efter varje samtal för att inte skada personer med normal hörsel.



Volymförstärkningen behålls efter varje samtal.

Denna inställning skall bara aktiveras om samtliga användare har nedsatt hörsel som kräver kraftig förstärkning.

OFF Kraftig volymförstärkning avstängd.

Varning!

Lurens volym kan bli väldigt hög om kraftig volymförstärkning används.

Volymförstärkning ska bara användas av personer med nedsatt hörsel.

3. Klangfärg



4. R-knappstid (100/300/600)

100 är normalinställningen för de flesta länder.

Hörslinga

Luren har en inbyggd hörslinga för de som vill använda sin hörapparat när de telefonerar. Koppla in hörapparaten genom att ställa hörapparaten i **T**-läge.

Övrigt

Om utrustningen inte fungerar

Kontrollera att telesladden är hel och ordentligt isatt. Koppla bort alla eventuella tillsatsutrustningar, förlängningskablar och andra telefoner. Om apparaten fungerar nu finns felet i någon annan utrustning. Prova gärna på en annan telelinje (t ex hos en granne). Fungerar apparaten där är det troligen fel på din telelinje. Ring felanmälan till din teleoperatör. Om inget av ovanstående hjälper, kontakta inköpsstället.

Garanti

Denna apparat har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag kontakt med inköpsstället. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/fakturakopia.

Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller åverkan, inträngande vätska, vanvård, onormalt brukande eller något annat förhållande på köparens sida. Garantin gäller inte heller för fel som uppstått på grund av åska eller andra elektriska spänningsvariationer.

För säkerhets skull rekommenderar vi att du drar ur apparatens teleanslutning under åskväder.

Declaration of conformity

Doro deklarerar härmed att produkten Doro MemoryPlus 319i ph överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC (R&TTE), 2002/95/EC (ROHS). Kopia av tillverkardeklarationen finns på www.doro.com/dofc

Version 1.0

www.doro.com

