

## Bruksanvisning Attainment Express One™



*Express One kan användas för allmänna eller personliga, intalade meddelanden, AKK, minnesstöd, mm. Ett meddelande på högst 10 sekunder.*

- Express One kan förses med bild/foto i formatet c:a 113 x 149 mm. Storlek: 162 x 187 x 20 mm. Vikt c:a 220 gram. Grönt plasthölje. Kan ligga på bord eller hängas på vägg. För att läsa ut: tryck på bilden eller "guldknappen".

### Använda Express One

Sätt i medföljande batterier - se rutan till höger!  
Lossa de två spärrarna på vänster långsida och ta försiktigt bort luckan. Sätt i en bild, som har samband med det som ska sägas. Det medföljer även 2 passepartouter. Sätt tillbaka luckan och lås den till läge LOCK. Express One kan användas liggande plant eller hängas på vägg. Det finns inbyggda tavelfästen för detta ändamål. Utläsning kan göras genom att trycka på "guldknappen" eller på bilden. Följ anvisningarna nedan för att spela in och läsa upp meddelandet.

#### • Spela in /ersätta meddelandet


1. Kontrollera att volymkontrollen **VOLUME** är i läge **Low** eller **Hi** och inte på **0**.
2. Skjut **REC/PLAY** knappen (är på baksidan, ovanför batterifacket) till läge **REC** för att spela in ditt meddelande.
3. Tryck på och håll nere "bilden" - *inte "guldknappen"* på framsidan. Tala in meddelandet i mikrofonen (**MIC**), ovanför "guldknappen". Prata på ett avstånd på c:a 10 cm. Släpp "bilden" när du är klar.
4. Under inspelningen, kommer lysdioden (LED) att lysa så länge det finns inspelningstid, dvs högst **10 sekunder**. Kontrollera inspelningen med "guldknappen". Gör om (pkt 3) ifall det inte låter bra.
5. Skjut **REC/PLAY** knappen (på baksidan) till läge **PLAY** för att avsluta inspelningen.

#### • Spela upp meddelandet

Tryck på och släpp "bilden" eller "guldknappen" på framsidan.

#### • Ta bort meddelandet

I läge **REC**, tryck kort på "bilden". Meddelandet är nu borttaget.

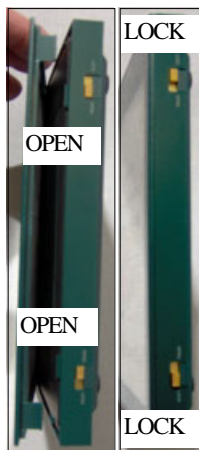

- **Installera/byta batterierna**  
När ljudet inte låter bra vid uppläsning är detta ett tecken på att batterierna behöver bytas.



Vid batteribyte, drar du ut luckan på undersidan och tar bort de gamla batterierna. Inspelat meddelande finns kvar i apparaten efter batteribytet.

Sätt i 2 nya LR03 (AAA) alkaliebatterier enligt markeringarna i batterifacket. Sätt på luckan igen.

*Du skall alltid byta **båda** batterierna vid samma tillfälle!*

### Avfallshantering

*Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.*



**Rehabmodul AB**

För kommunikation  
med datorprogram  
och AKK-talapparater