


Rehabmodul AB Snabbguide



GoTalk32+

©: Rehabmodul AB, 05/2011 Enspännargatan 10 • 165 57 Hässelby • Tel: 08-583 588 90 • www.rehabmodul.se

Brukarstöd: support@rehabmodul.se

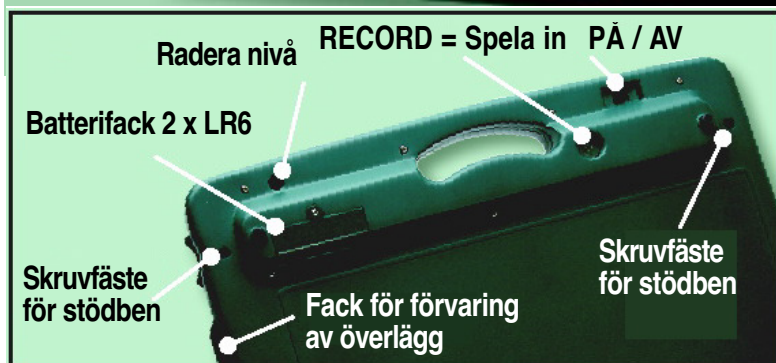

**TOTAL INSPELNINGSTID
ÄR c:a 27 MINUTER**

På baksidan av GoTalk finns en etikett på engelska som kortfattat visar de viktigaste funktionerna och hur de används. GoTalk levereras med en etikett på svenska, som du kan sätta fast om du vill.

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

Spela in meddelanden

- Sätt på GoTalk med PÅ/AV-strömbrytaren på baksidan. Lägg PÅ (ON) - om den inte redan är på. Nivålysdioderna tänds upp och ett pip hörs.
- Tryck och släpp **RECORD** tangenten (på baksidan). En grön nivålysdiod (LED) och den röda RECORD-LED ska nu vara tända.
- Medan båda LED lyser - **tryck på och släpp** önskad meddelandetangent. Den röda lysdioden börjar blinka, för att indikera att inspelning nu sker.
- Tala in i mikrofonen (placerad upptill, längst till höger). När du talat färdigt, tryck på valfri tangent.
- Fortsätt att spela in varje meddelande på denna eller flera nivåer. När du är klar: Tryck och släpp **RECORD** tangenten (på baksidan).

TIPS!

Under inspelningarna kan du enkelt kontrolllyssna utan att lämna inspelningsläget - tryck bara på någon av volymknapparna! Låt GoTalk ligga på t ex ett bord vid inspelning, för att undvika onödiga skrapljud.



Läsa ut meddelanden

- Tryck (och släpp) eller glid över (med tryck) på önskad meddelandetangent och inspelat meddelande läses upp. En grön nivålysdiod blinkar samtidigt. **V.G. VÄND!**



Spela över ett meddelande

- Följ proceduren enligt ovan!

Radera enstaka meddelande

- Följ proceduren enligt ovan, men tala inte in någonting.

Nivåer

Ändra nivå

Tryck på nivåknappen en gång. Grön LED visar vald nivå. Tryck upprepat på samma knapp för att ändra till annan nivå. Byt överlägg för att passa till nu vald nivå.

Radera en hel nivå

Tryck upprepat på nivåknappen fram till den nivå som ska raderas. Tryck och släpp **RECORD** tangenten (på baksidan).

Med spetsen på t ex en kulspetspenna, trycks knappen in vid "ERASE" (på baksidan). Den valda nivån raderas helt. Repetera för att radera andra nivåer.

OBS! Denna procedur raderar inga meddelanden, som lagrats under *direktvalstangenterna*.

Strömförsörjning

- I läge AV drar GoTalk ingen ström. Vid PÅ - en mycket låg ström i viloläge.
- Drivs med 2 stycken 1,5 volts alkalinebatterier av typ LR6.
- Tillverkaren anger en batterilivslängd på 3 - 6 mån. vid normal användning.
- Batterierna finns i batterifacket på baksidan. Luckan är skruvförsedd.

Volym

Volymen - högtalarljudet - styrs med och knapparna på apparatens vänstersida.

Funktionslås

Funktionslåset används för att förhindra oönskad påverkan av nivåer eller inspelningar.

Förhindra nivåbyte

Aktivera låset genom att hålla **RECORD** (på baksidan) intryckt. Röd RECORD och grön nivå LED tänds. Fortfarande med intryckt **RECORD** tangent, tryck på och släpp knappen **VOLYM NED** . Röd och grön LED släcks, vilket indikerar att låset är PÅ.

Förhindra inspelningar

Aktivera låset genom att hålla **RECORD** (på baksidan) intryckt. Röd RECORD och grön nivå LED tänds. Fortfarande med intryckt **RECORD** tangent, tryck på och släpp knappen **VOLYM UPP** . Röd och grön LED släcks, vilket indikerar att låset är PÅ.

Ta bort låsen

Stäng av GoTalk med huvudströmbrytaren (på baksidan - läge AV). Håll **RECORD** (baksidan) intryckt och sätt på GoTalk med huvudströmbrytaren till läge PÅ. När ett pip hörs är låsen borttagna.

Fack för förvaring av överlägg

Minst ett överlägg för varje nivå, kan ligga i facket. Överläggen är lätt tillgängliga vid byte av nivå.

Stödben

Två stödben (c:a 70 mm långa) för att höja upp bakre långsidan medföljer. De skruvas i de gängade hålen på undersidan.

Användningsområden

GoTalk kan användas i olika aktiviteter. Några få exempel:

- *Allmän, talad kommunikation.*
- *Talad kommunikation i vissa sammanhang och miljöer.*
- *Läsa upp instruktioner och anvisningar i givna miljöer och sammanhang.*
- *Träning i användning av ett talande AKK-hjälpmiddel.*
- *Träning av bild- och språkförståelse.*

3 direktvalstangenter

Inspelning: Följ samma procedur som för meddelandetangenter. Ett meddelande inspelat på en direktvalstangent kan alltid användas oavsett vald nivå. En ny inspelning läser över den gamla.



De 3 direktvalstangenterna kan anpassas för valfria aktiviteter!



eller



Direktvalstangenterna bör användas för ord och fraser som används ofta. Sociala fraser, t ex hälsningar, kommentarer, frågor etc.

- 32 meddelandetangenter med 5 nivåer var - ger totalt 160 meddelanden.
- 3 direktvalstangenter (27 x 24 mm). Kan användas oberoende av vald nivå.
- Totala inspelningstiden är c:a 27 minuter. • Rutstorleken är 31 x 29 mm.
- Inbyggt handtag. • Låg vikt, c:a 950 g. • Formatet är 362 x 254 x (42) 28 mm.
- Meddelandena är kvar även när batterierna är urladdade eller tagits ur!