

# Rehabmodul AB Snabbguide

©: Rehabmodul AB, 08/2005

Enspännargatan 10 • 165 57 Hässelby • Tel: 08-583 588 90 • [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)



# GoTalk4+

Brukarstöd: [support@rehabmodul.se](mailto:support@rehabmodul.se)

Nivåindikering  
gröna  
lysdioder

Mikrofon

Högtalare

Direktvals-  
tangenter  
17 sekunder  
på vardera


Meddelande-  
tangenter -  
Nivå 1: 20 sek.  
på varje tangent  
Nivå 2 - 5:  
10 sek. på varje  
tangent

PÅ/AV  
knapp

Radera  
nivå

RECORD  
= spela in

Batterifack

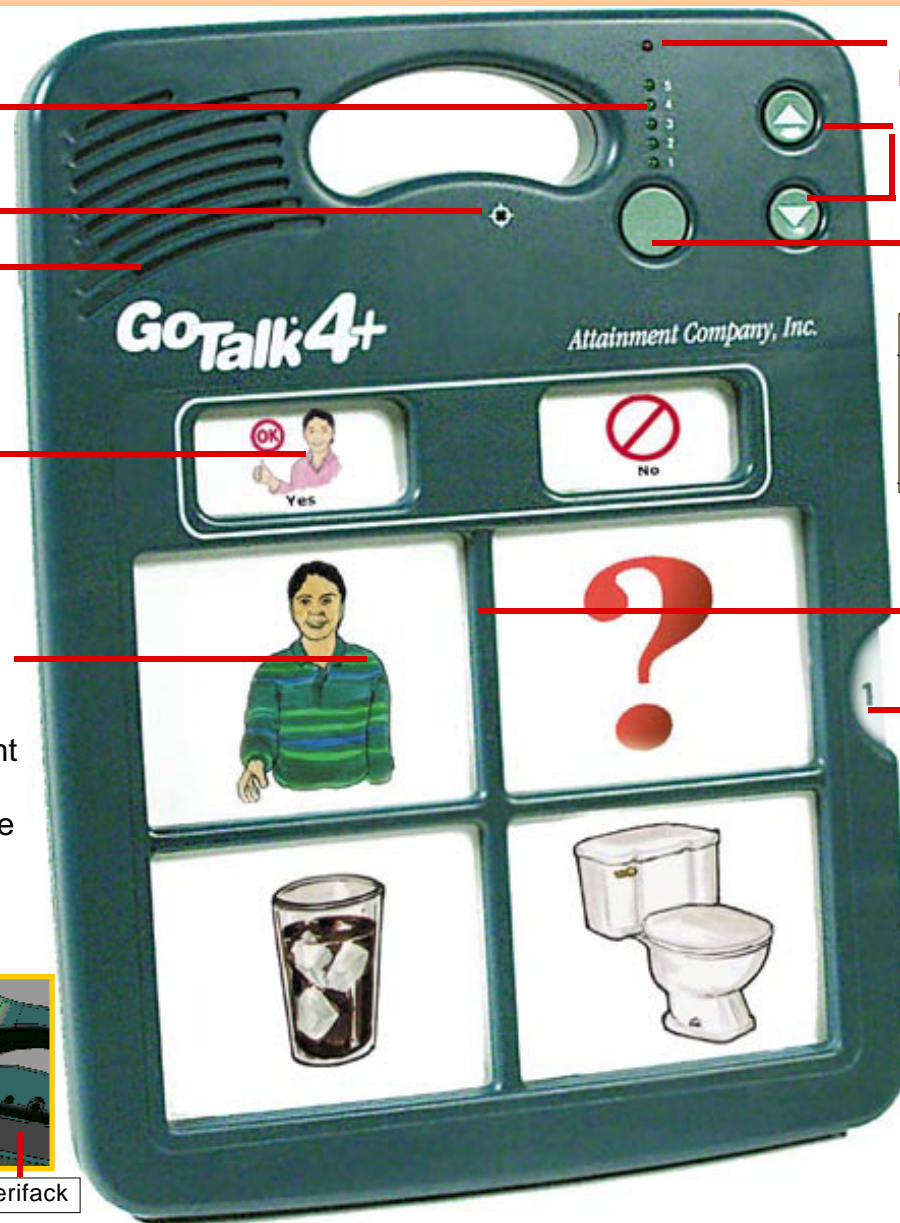

Inspelning  
röd lysdiöd

Volymkontroller

Byt nivå  
tangent

*På baksidan av GoTalk finns en etikett på engelska som kortfattat visar de viktigaste funktionerna och hur de används. GoTalk levereras med en etikett på svenska, som du kan sätta fast om du vill.*

Inbyggd  
hålraster

Skyddsflack i  
plast &  
Överläggsflack

**Total  
inspelningstid  
är 4 minuter  
och  
34 sekunder**

## Spela in meddelanden

- Sätt på GoTalk med huvudströmbrytaren på baksidan. Läge PÅ (ON) - om den inte redan är på. Ett pip hörs.
- Tryck och släpp **RECORD** tangenten (på baksidan). En grön nivålysdiod (LED) och den röda RECORD-LED ska nu vara tända.
- Medan båda LED lyser - **tryck på och släpp** önskad meddelandetangent. Den röda lysdioden börjar blinka, för att indikera att inspelning nu sker.
- Tala in i mikrofonen, som är placerad under handtaget. När du talat färdigt, tryck på valfri meddelandetangent.
- Fortsätt att spela in varje meddelande på denna eller flera nivåer. När du är klar: Tryck och släpp **RECORD** tangenten (på baksidan).



## Läsa ut meddelanden

- Tryck (och släpp) eller glid över (med tryck) på önskad meddelandetangent och inspelat meddelande läses upp. En grön nivålysdiod blinkar samtidigt. **V.G. VÄND!**

# Rehabmodul AB Snabbguide

©: Rehabmodul AB, 08/2005

Enspännargatan 10 • 165 57 Hässelby • Tel: 08-583 588 90 • [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)



# GoTalk4+

Brukarstöd: [support@rehabmodul.se](mailto:support@rehabmodul.se)

## Nivåer

### Ändra nivå


Tryck på nivåknappen en gång. Grön LED visar vald nivå. Tryck upprepat på samma knapp för att ändra till annan nivå. Byt överlägg för att passa till nu vald nivå.

### Radera en hel nivå

Tryck och släpp **RECORD** tangenten (på baksidan). Tryck upprepat på nivåknappen fram till den nivå som ska raderas.

Med spetsen på t ex en kulspeppenna, trycks knappen in vid "Erase Level" (på baksidan). Den valda nivån raderas helt. Repetera ovanstående för att radera andra nivåer.

**OBS!** Denna procedur raderar inga meddelanden, som lagrats under direktvalstangenterna.

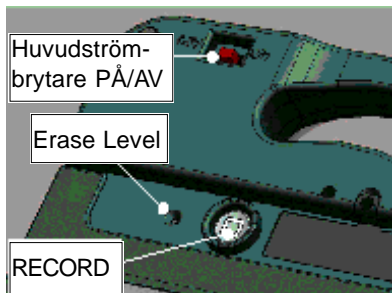

## Strömförsörjning

- I läge AV drar GoTalk ingen ström. Vid PÅ - en mycket låg ström i viloläge.
- Drivs med 2 stycken 1,5 volts alkaliebatterier av typ LR6. • Tillverkaren uppger en batterilivslängd på 3 - 6 månader vid normal användning.
- Batterierna finns i batterifacket på baksidan. Luckan är försedd med en skruv.

## Funktionslås

Funktionslås används för att förhindra oönskad påverkan av nivåer eller inspelningar.



### Förhindra nivåbyte

Aktivera låset genom att hålla **RECORD** (på baksidan) intryckt. Röd RECORD och grön nivå LED tänds. Fortfarande med intryckt **RECORD** tangent, tryck på och släpp knappen **VOLYM NED**. Röd och grön LED släcks, vilket indikerar att låset är PÅ.

### Förhindra inspelningar

Aktivera låset genom att hålla **RECORD** (på baksidan) intryckt. Röd RECORD och grön nivå LED tänds. Fortfarande med intryckt **RECORD** tangent, tryck på och släpp knappen **VOLYM UPP**. Röd och grön LED släcks, vilket indikerar att låset är PÅ.

### Ta bort låsen:

Stäng av GoTalk med huvudströmbrytaren (på baksidan - läge AV). Håll **RECORD** (på baksidan) intryckt och sätt på GoTalk med huvudströmbrytaren till läge PÅ. De gröna lysdioderna tänds en i taget och den röda tänds helt kort. Även ett pip hörs.

## Fack för förvaring av överlägg



Minst ett överlägg för varje nivå, kan förvaras i facket. Överläggen är nu lätt tillgängliga vid byte av nivå.

## Användningsområden

GoTalk kan användas i olika aktiviteter. Här är några få exempel:


- Allmän, talad kommunikation.
- Talad kommunikation i vissa sammanhang och miljöer.
- Läsa upp instruktioner och anvisningar i givna sammanhang.
- Träning i användning av ett talande AKK-hjälpmiddel.
- Träning av bild- och språkförståelse.

## 2 direktvalstangenter


*Inspelning:* Följ samma procedur som för meddelandetangenter. Ett meddelande inspelat på en direktvalstangent kan alltid användas oavsett vald nivå. En ny inspelning läser över den gamla.



De 2 direktvalstangenterna kan anpassas för valfria aktiviteter!

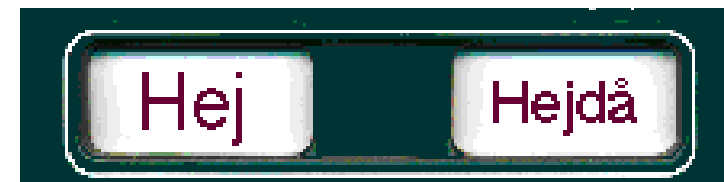

eller?

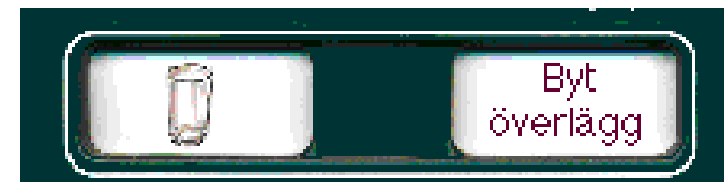

Direktvalstangenterna bör användas för ord och fraser som används ofta. Sociala fraser, t ex hälsningar, kommentarer, frågor etc.

- 4 meddelandetangenter med 5 nivåer var - ger totalt 20 meddelanden.
- 2 direktvalstangenter, som kan användas oberoende av vald nivå.
- Totala inspelningstiden är c:a 4,5 minuter. • Rutstorleken är 87 x 69 mm.
- Inbyggt handtag. • Låg vikt, c:a 600 g. • Formatet är 230 x 300 x 28 mm.
- Inspelade meddelanden är kvar även när batterierna är urladdade eller tagits ur!