



**Total
inspelningstid
är ca 5 minuter**

Volymkontroll
för högtalaren
- pilknappar
upp & ned

6 meddelandetangenter
med tangentraster
- format: 27 x 24 mm

Användningsområden

- Allmän, talad kommunikation.
- Talad kommunikation i vissa sammanhang och miljöer.
- Läsa upp instruktioner och anvisningar i givna sammanhang.
- Träning i användning av ett talande AKK-hjälpmiddel.
- Träning av bild- och språkförståelse.



Överläggsöppning

Ej på bild
Platta med hål
för fastsättning
av halsrem

Huvudströmbrytare,
läge: **PÅ AV**

Överlägg
med plats
för 6 bilder

RECORD = SPELA IN

Lysdiod -lyser vid inspelning

Lysdioder
1 - 5 för nivå-
indikering

Högtalare

Mikrofon

GoTalk™ POCKET

Naturlig storlek

Batterifacket finns på baksidan, under överläggsfacket.

Spela in meddelanden

- Sätt på GoTalk Pocket med huvudströmbrytaren på apparatens högersida. Lägg PÅ (ON) - om den inte redan är på.
- Tryck och släpp RECORD tangenten på högersidan. En av de gröna nivålysdiодerna (LED) samt den röda lysdioden (inspelning) tänds.
- Medan LED lyser - tryck på och släpp önskad meddelandetangent - rutan för ditt meddelande. Den röda lysdioden börjar blinka.
- Tala in i mikrofonen (nedanför nivå-siffran 1). Varje ruta kan spela in ett meddelande på högst 10 sekunder. Inspelningsnivån är automatiskt reglerad.
- Låt tiden gå ut (röda lysdioden börjar lysa med fast sken) eller avsluta inspelningen genom att trycka på valfri meddelandetangent.
- Fortsätt att spela in varje meddelande på denna eller andra nivåer - efter nivåbyte.
- När inspelningarna är klara - tryck åter på RECORD tangenten.
- *Spela över ett meddelande:*
Följ proceduren enligt ovan!
- *Radera ett enskilda meddelande:*
Följ proceduren enligt ovan, men tala inte in något meddelande!
- *För att radera hela nivåer, se nästa sida!*

V.G. VÄND!



Läsa ut meddelanden

Tryck på och släpp önskad meddelandetangent och inspelat meddelande läses upp.

- Ett meddelande kan stoppas genom att trycka på en annan meddelanderuta.

Volym

Volymen - högtalarljudet styrs med pilknapparna på apparatens vänstersida.

Överlägg

Ett antal tomma överläggsark medföljer, på vilka du kan sätta på bilder etc.

- Överläggsöppningen finns på apparatens övre kortsida.



Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

Scanning? - Nej!

Till skillnad från föregående modell -Pocket GoTalk går det inte att använda scanning i GoTalk Pocket.

Bärrem

Bärrem medföljer och sätts fast i hålen i hållaren vid överläggsöppningen. Bärremmen är delad och sammanfogad med kardborrefäste, som släpper vid måttlig belastning. Avsikten med detta är att minimera stryprisken, om man fastnar i gångting.

Strömförsörjning

- I läge AV drar GoTalk Pocket ingen ström. Vid PÅ - mycket låg ström när den inte pratar (viloläge).
- 3 stycken 1,5 volt alkaline-batterier, typ LR03 (AAA). Enligt tillverkaren en batterilivslängd på 3 - 6 månader vid "normal användning".
- Batterierna finns i batterifacket på baksidan. Luckan är försedd med en skruv. Överläggsfacket måste dock först tas bort, vilket görs genom att försiktigt bända loss den i underkanten.

Ändra nivå


GoTalk Pocket har 5 nivåer med 6 meddelanden per nivå, dvs totalt 30 meddelanden.

- Tryck på nivåknappen en gång. Grön, blinkande lysdiod visar vald nivå.
- Tryck upprepat på samma knapp för att ändra till en annan nivå. Byt överlägg för att passa till vald nivå.

Radera hela nivåer

Du behöver inte ta bort överläggsfacket för att radera hela nivåer, men du måste dock plocka ut de överlägg som förvaras i facket, för att komma åt ERASE knappen.

- Tryck och släpp RECORD knappen. (En grön nivå-lysdiod samt den röda lysdioden (inspelning) tänds.)
- Tryck upprepat på nivåknappen fram till den nivå som ska raderas.
- Med spetsen på t ex en kulspetspenna, uträtat gem etc, skall knappen ERASE (ini hålet) tryckas in. Den valda nivån raderas nu helt.

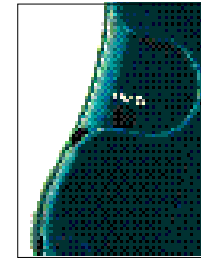

- Tryck och släpp RECORD tangenten, när det är klart.
- Repetera ovanstående för att radera andra nivåer.

Funktionslås

Funktionslås används för att förhindra oönskad påverkan av nivåer eller inspelningar.

Vid leveransen är låsen inte aktiverade.

Förhindra inspelningar

- Tryck och håll nedtryckt RECORD tangenten samt tryck på och släpp volymknappen med *uppåt* pil.
- De röda och gröna lysdioderna släcks. Låset är nu aktivt och inga inspelningar kan nu göras.

Förhindra nivåbyten

- Tryck och håll nedtryckt RECORD tangenten samt tryck på och släpp volymknappen med *nedåt* pil.
- De röda och gröna lysdioderna släcks. Låset är nu aktivt och inga nivåbyten kan nu göras.

Ta bort låsen

- Stäng av apparaten med huvudströmbrytaren (AV).
- Tryck och håll nedtryckt RECORD tangenten och sätt på apparaten igen med huvudströmbrytaren (PÅ).
- Vänta tills lysdioderna lyser kort och ett pip hörs. Släpp sedan RECORD knappen.

- 6 meddelandetangenter med 5 nivåer var - ger totalt 30 meddelanden.
- Varje meddelanderuta kan lagras 10 sekunder var på varje nivå.
- Totala inspelningstiden är cirka 5 minuter.
- Rutstorleken är 27 x 24 mm.
- Låg vikt, c:a 185 gram.
- Formatet är 145 x 92 x 24 mm.
- Inspelade meddelanden finns kvar även när batterierna är urladdade eller tagits ur!