


Automatiskt klick med MagicCursor 2000

För de som kan peka med en datormus/musersättare som t ex **Tracker PRO**, men som inte kan eller har svårt att klicka med musknapparna, erbjuder programmet **MagicCursor 2000** en lösning. Programmet utför automatiskt önskad typ av musklick efter en viss inställbar tid, när man pekat på något.



Tracker PRO arbetar med en enkel princip: Reflektion av ljusrörelser konverteras till datormusrörelser. För att enkelt få klickfunktioner används **MagicCursor 2000!**

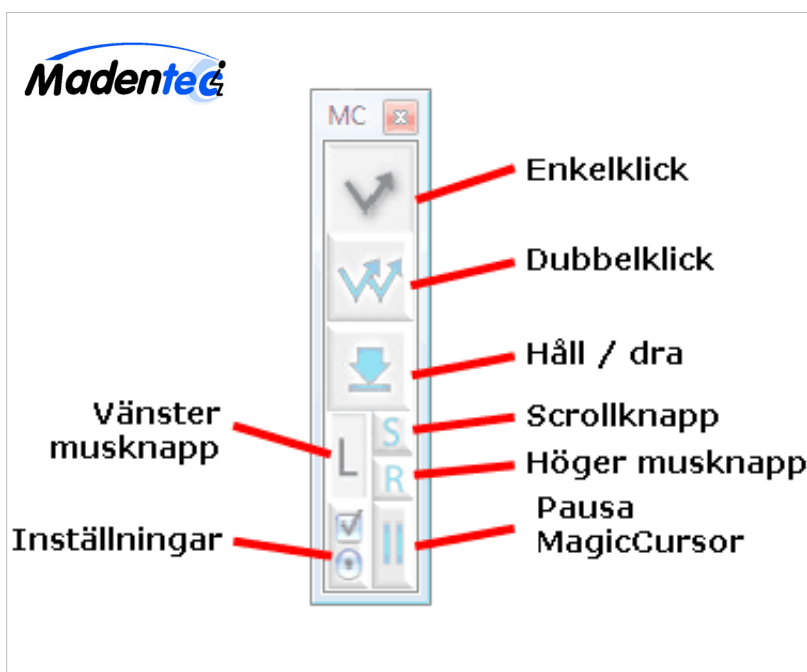

Det är inte bara **Tracker PRO** som kan behöva denna lösning med **MagicCursor 2000!** Det gäller alla program som inte har inbyggda klickfunktioner. Speciellt program avsedda för barn och i arbetslivet!

- **Flytande verktygsfält** Från verktygsfältet kan man enkelt välja önskad typ av musklick (eller pausa automatiskt musklick tillfälligt). Verktygsfältet finns i 3 storlekar för att passa olika skärmpoplösningar och ergonomiska krav. Verktygsfältet ligger normalt alltid överst ovanpå alla andra fönster för att vara lätt tillgängligt, men detta kan stängas av om så önskas. Verktygsfältet kan minimeras till aktivitetsfältet.
- **Meny i aktivitetsfältet** Om verktygsfältet är minimerat till aktivitetsfältet visas en MagicCursor symbol i verktygsfältet. Genom att peka på den visas en ny meny där det går att välja en annan funktion.
- **Flera användarlägen** MagicCursor har flera användarlägen för att passa olika typer av användare. För mycket avancerade användare finns "gester", som möjliggör att välja musfunktion genom att röra på musen.
- **Scrollfunktion** Ger tillgång till IntelliPoint's mittenknappens scroll-funktion, vilket gör det möjligt att bläddra i flersidiga dokument med bara ett klick.
- **Omvänd muspil** I Windows, om muspilen flyttas till högra eller nedre sidan av skärmen syns inte pilen längre. Denna funktion gör att pilen alltid syns.

PRODUKTER

MagicCursor 2000

Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris!

Artikelnummer

6472

Systemkrav

• PC med Windows 2000/XP/Vista/7

Rehabmodul AB är ansluten till



ISO 22 36 06

Rehabmodul AB



För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater

Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby

Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99

Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se

Hemsida: www.rehabmodul.se



Handla även direkt på webben!

Besök [Butiken](http://www.rehabmodul.se) på
www.rehabmodul.se

© Copyright 12/2010, Rehabmodul AB