

Rehabmodul AB Snabbguide



Photophone 100

©: Rehabmodul AB, 05/2016

Astrakängatan 151 • 165 52 Hässelby • Tel: 08-583 588 90 • www.rehabmodul.se

Brukarstöd: support@rehabmodul.se



Telefon Geomarc Photophone 100

För anslutning till analoga telenätet eller bredbandsmodem med telefonuttag
Artnr 2205

Storlek: 230 x 180 x 45 mm

Vikt: 770 gram

Strömförsörjning via telenätet
alt. modemets telefonuttag

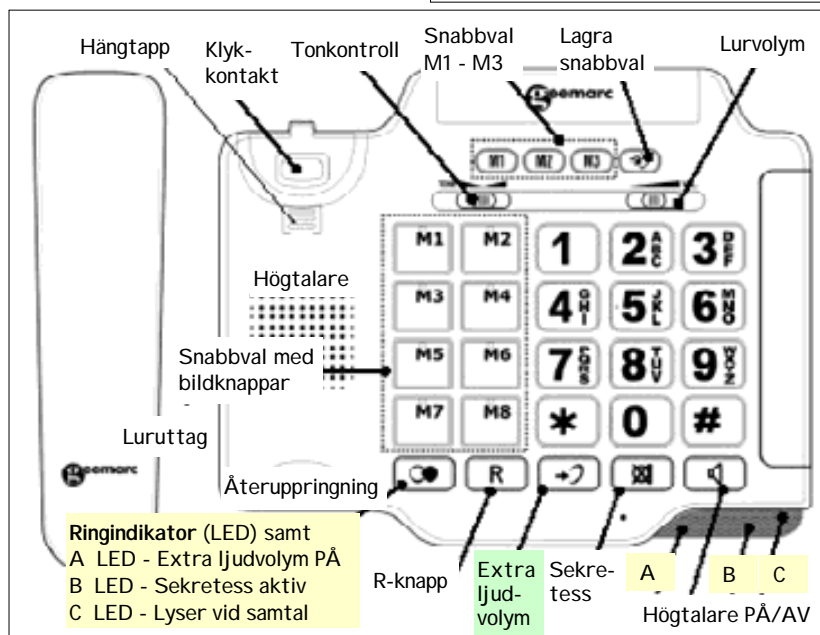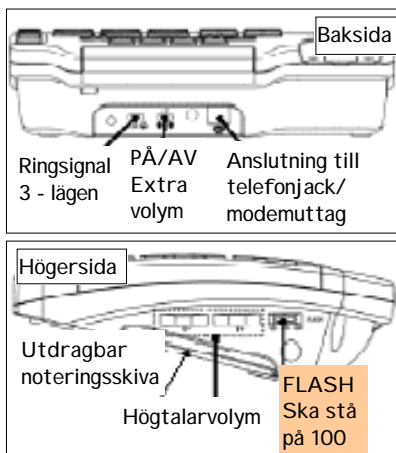

1) Tekniska data

- 11 snabbvals-knappar för egenlagda telefonnummer, varav 8 med plats för bilder samt 3 under knapparna M1 - M3.
- 10 snabbvalsnummer kan antecknas på en utdragbar noteringsskiva
- Stora tangentbordsknappar - 25 x 20 mm. Bildknapparna - 22 x 20 mm
- Steglöst reglerbar lurvolym. Tonkontroll. Extra hög lurvolym +30 dB, med knapp
- Högtalande med reglerbar volym
- Hörslinga T3/M3
- Reglerbar (3 lägen) ringsignal >80 dB, synlig ringindikator
- Kan väggmonteras

2) Inkoppling

- Lurens spiralsladd ansluts till uttaget på telefonens vänstersida.
- **På telefonens baksida:**
 - Anslut telesladden till ett telejack/telefonuttag på modemmet (det måste finnas ett abonnemang för telefon) och modularuttaget på baksidan.
 - Ställ in rätt FLASH-tid till 100.
 - Ringsignalen kan sättas i ett av 3 lägen- INGEN, LÅGT & HÖGT.
- Lyft luren och kontrollera att kopplingston hörs. Lurens ljudvolym justeras med skjutregeln på ovansidan. Extra förstärkning görs med att trycka in knappen "Extra ljudvolym".

- Gör ett provsamtal. Lyft luren. Slå numret. Avsluta med att lägga på luren. (Ring upp telefonen för att kontrollera ringsignalen.)

3) Väggmontering

- Skjut upp hängtappen, vänd ett halvt varv och sätt tillbaka igen. Hängtappen sticker upp en liten bit, så att luren inte faller av.
- Sätt 2 skruvar med 80 mm från varandra i höjddled. De ska sticka ut c:a 7mm från väggen.
- Häng upp telefonen på skruvarna och korrigerar vid behov!

4) PÅ/AV Extra volym

- Läge PÅ

Extra ljudvolym och ton aktiveras automatiskt var gång telefonen används. LED "A" lyser då för att visa att funktionen är på.

- Trycks "Extra ljudvolym" ned under ett samtal stängs funktionen av. Ljudvolymen kan dock justeras med skjutregeln "Lurvolym".
- Det har ingen betydelse om knappen "Extra ljudvolym" trycks ned upprepat under ett pågående samtal. Vid ett nytt samtal när luren lyfts är funktionen aktiverad igen.

- Läge AV

Funktionen "Extra ljudvolym och ton" är nu avstängda. LED "A" är släckt, dvs funktionen är av.

- Trycks "Extra ljudvolym" ned, under ett samtal, sätts funktionen på och LED "A" lyser.
- Trycks "Extra ljudvolym" ned igen under samma samtal stängs funktionen av och LED "A" slocknar. Vid nytt samtal, när luren lyfts, är funktionen av.

- Tonkontroll

När "PÅ/AV Extra volym" är aktiverad, kan tonkontrollen användas för att justera bas och diskant, med max +10 dB. Använd skjutreglaget "Tonkontroll" på telefonens ovansida.

- Om "PÅ/AV Extra volym" är AV fungerar inte funktionen.

5) Ringa ett samtal

- Med luren

- Lyft luren. Slå numret. Avsluta med att lägga på luren.

- Med högtalaren

Mikrofonen är automatisk. När man slutar prata, stängs mikrofonen av och telefonen övergår till lyssningsläge. Funktionen kan påverkas av omgivande hög ljudnivå, t ex buller, musik etc i omedelbar närhet.

Fortsättning på nästa sida!

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

Photophone 100 är tillverkad av: Geomarc Telecom SA, Frankrike CE-märkt. 2 års garanti för tillverkningsfel.

- Tryck på knappen "Högtalare PÅ/AV" - invänta kopplingston. Slå numret. Avsluta med att trycka på "Högtalare PÅ/AV".

- Under pågående samtal, tryck på knappen "Högtalare PÅ/AV" och lägg på luren samtidigt.

- Högtalarfunktionen stängs av genom att lyfta luren.

- När högtalarfunktionen är på, kan bara en person i taget prata - inte båda samtidigt.

- I **högtalande läge** justeras ljudvolymen med knapparna på telefonens högersida.

6) Svara på samtal

Telefonen ringer vid inkommande samtal och "Ringindikatorn" lyser.

- Lyft luren för att svara. Avsluta samtalet med att lägga på luren.

ELLER

- Tryck på "Högtalare PÅ/AV" för att svara. Avsluta samtalet med att trycka på "Högtalare PÅ/AV" igen.

7) Återuppringning

- Lyft luren alternativt tryck på "Högtalare PÅ/AV".
- Tryck på knappen "Återuppringning". Telefonen ringer automatiskt upp det senast slagna telefonnumret.

8) Sekretessknapp

- Mikrofonen kopplas bort under samtal genom att trycka på knappen "Sekretess". LED "B" lyser.
- Tryck en gång till för att återinkoppla mikrofonen.

9) Hörselslinga

Telefonen har inbyggd hörselslinga (i luren) för den som vill använda sin hörapparat vid telefonering.

- Koppla in hörapparatens telespole genom att ställa hörapparaten i T-läge, för att lyssna via slingan.

10) R-knapp

"R-knapp" kan användas för tjänster som telefonoperatören kan erbjuda. T ex låta samtal vänta eller koppla samtal vidare till en annan intern anknytning. För att det ska fungera måste knappen "FLASH" vara ställd i läge 100. Telefonoperatören kan ge mer information.

11) Lagra snabbval

Det finns 11 snabbvalsknappar: 3 snabbval under knapparna M1-M3

SAMT

8 snabbval med bildknappar

Lagra snabbvalsnummer:

1. Lyft luren
2. Tryck på knappen "Lagra snabbval" på telefonens ovasida. *Bry dig inte om kopplingstonen!*
3. Slå telefonnumret du vill lagra (max 32 siffror) med siffertangenterna.
4. Använd vid behov, knappen "Återuppringning" för att lägga in ett mellanslag (paus).
5. Tryck på den snabbvalsknapp, där telefonnumret ska lagras.
6. Tryck på knappen "Lagra snabbval" igen. Telefonnumret är nu lagrat.

När ett telefonnummer lagras på en snabbvalsknapp, skrivs ett eventuellt befintligt nummer över.

- Lägg in en bild/text i bildknapparna, som representerar det telefonnummer som finns på knappen, som stöd för minnet.
- De bilder som finns på knapparna (från början) kan inte enkelt tas bort. Stick in den nya bilden eller lossa och ta bort plastlocket på knappen och lägg på bilden och tryck fast locket igen.
- Bildformatet får inte överstiga 19 x 16 mm. Det medföljer ett ark med några bilder.

- Telefonnummer som sparats kan antecknas på den utdragbara notisskivan, som finns på telefonens högra sida.

12) Ringa samtal med snabbval

1. Lyft luren- invänta kopplingston
2. Tryck på en snabbvalsknapp med ett lagrat telefonnummer
3. Telefonen ringer automatiskt upp telefonnumret

ELLER

1. Tryck på knappen "Högtalare PÅ/AV" - invänta kopplingston.
2. Tryck på en snabbvalsknapp med ett lagrat telefonnummer
3. Telefonen ringer automatiskt upp telefonnumret

13) Underhåll och skötsel

- Använd produkten med varsamhet för att få lång produktlivstid.
- Placera den inte där den kan utsättas för regn, vatten eller fuktiga omgivningar samt starkt solljus/värme.
- Om produkten blir smutsig, torka den då med en fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

14) Felsökning

- Ingen ringsignal

- Kontrollera att telesladden är rätt inkopplad och inte skadad.
- Vid anslutning till modem, kontrollera om det fungerar som det ska. Gör eventuellt en omstart.
- Prova en annan telefon i telefonjacket/-modemuttaget, för att se om felet ligger i telefonen.
- Kontrollera att telefonens ringsignal inte är avstängd.

- Telefonen är tyst, ingen kopplingston hörs

- Kontrollera att telesladden är rätt inkopplad och inte skadad.
- Vid anslutning till modem, kontrollera om det fungerar som det ska. Gör eventuellt en omstart.
- Prova en annan telefon i telefonjacket/-modemuttaget, för att se om felet ligger i telefonen.

Kontakta Rehabmodul AB om telefonen fortfarande inte fungerar.