

# Bruksanvisning Pratpuck/Pratpuck PRO



Gedigen, robust och lättryckt talapparat med högt, klart ljud. Gör en egen inspelning - 10 sek.! 6 färger. *Pratpuck PRO kan lagra 30 sek. och har svart lock.* Vikt: 27g. Format: diam. 47 x 27 mm.

## Artnr:

3080-osorterade färger (någon/några av röd, orange, grön, blå, lila, gul)

3085-5 pack 3087-6 pack samt 3086-svart/PRO

## Spela in ett meddelande

- Sätt REC/OFF/PLAY knappen i läge REC.
- Tryck på knappen under hela inspelningen. Lysdioden tänds.
- Tala in i mikrofonen (MIC). Du kan spela in ett meddelande på högst 10 sek. (PRO 30 sek.). Inspelningsnivån är automatiskt reglerad.
- Låt tiden gå ut (lysdioden släcks) eller avsluta inspelningen genom att släppa knappen. När du är klar - sätt REC/OFF/PLAY i läge PLAY.

## Läsa upp ett meddelande


Tryck på knappen och inspelat meddelande läses upp. Ingen volymkontroll - anpassa därför inspelningarna till de förhållanden som de ska användas under.

## Spela över ett meddelande

Följ proceduren enligt ovan!

## Ta bort ett meddelande

Följ proceduren enligt ovan, men tala inte in något meddelande!

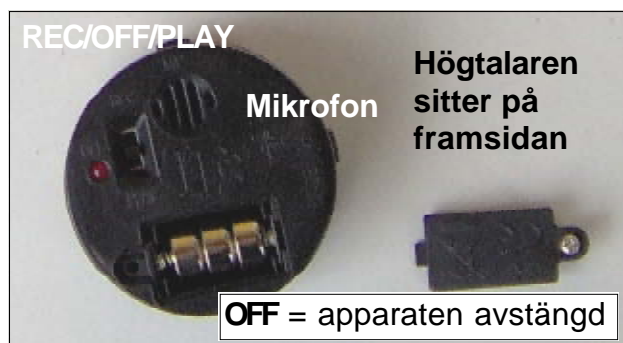

## Installera/byta batterier

*Batterier är isatta. När ljudet inte låter bra är det tecken på att batterierna behöver bytas. Byt alltid alla batterierna vid samma tillfälle! Batterifacket sitter på talapparatens undersida.*

- För att sätta i/byta batterierna, skruvar du ur skruven och tar bort luckan (och tar bort de gamla batterierna). Sätt i tre nya knappceller. *Glöm inte bort hur de ska sitta, dvs med släta sidan mot skruvhålet (Se bilden).* Batteritypen är alkaliebatterier, LR44, m fl. (Även silveroxidbatterier kan användas och beroende på fabrikat: SR44, AG13, D357, V357, 357, m fl.) Mått: diam. 11,6 x 5,4 mm samt 1,5 volt.

Sätt tillbaka luckan och skruva i skruven.

## Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

