

Rehabmodul AB Snabbguide



Geemarc PhotoDECT

©: Rehabmodul AB, 07/2016

Astrakängatan 151 • 165 52 Hässelby • Tel: 08-583 588 90 • www.rehabmodul.se

Brukarstöd: support@rehabmodul.se

Telefon Geemarc PhotoDECT

För anslutning till analoga telenätet eller bredbandsmodem med telefonuttag

Artnr 2135


Storlek, handenhet : 160 x 500 x 25 mm

Vikt handenhet: 130 gram

Strömförsörjning med laddningsbara batterier och adapter från elnätet

Handenhet
framsida




OBS! Det finns inga menyer på svensk! Välj engelska, spanska, mfl. (BRUX, s. 24)

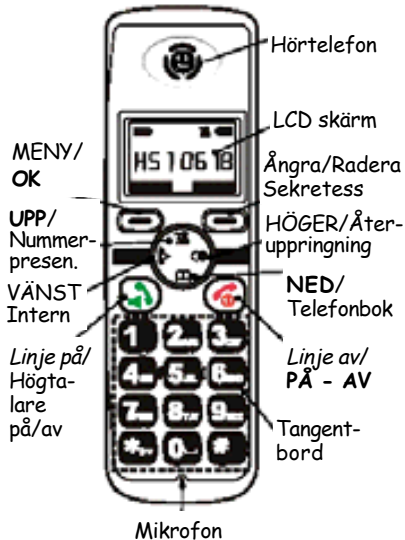

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

Handenhet
baksida

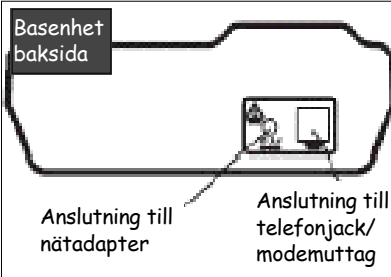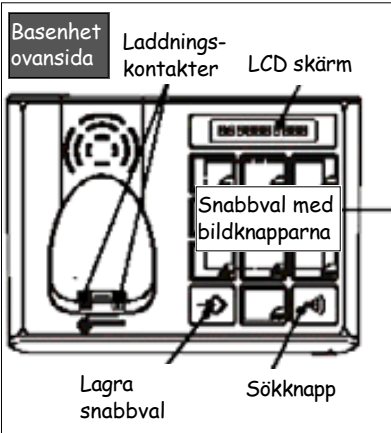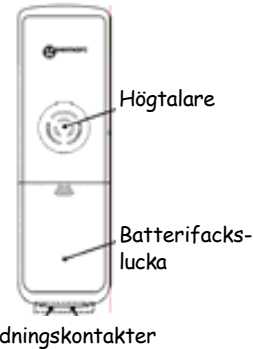

PhotoDECT är tillverkad av: Geemarc Telecom SA, Frankrike CE-märkt. 2 års garanti för tillverkningsfel.

	Dial/Speaker key Linje på/Högtal. på/av <ul style="list-style-type: none">Börjar och svarar på ett samtalAktiverar högtalaren under pågående samtal
	End/Power key Linje av/PÅ - AV <ul style="list-style-type: none">Avslutar ett samtalHåll nedtryckt för PÅ och AV
	Navigation Button Navigeringsknappar Up/CID key UPP/Nummerpresen. <ul style="list-style-type: none">Bläddrar upp i menylistanÖkar ljudvolymen under samtalÖppnar nummerpresentatören Down/Phonebook NED/Telefonbok <ul style="list-style-type: none">Bläddrar ned i menylistanMinskar ljudvol. under samtalÖppnar telefonboken Left/INT VÄNSTER/Intern samtal <ul style="list-style-type: none">Kräver fler handenheter
	Right/Redial HÖGER/Återuppringning <ul style="list-style-type: none">Öppnar återuppringningslistan

	Menu key (left) MENY (vänster knapp) <ul style="list-style-type: none">Öppnar menyfunkt. i vilolägeBekräftar val och aktiviteterUtför "Flash" funktion
	Menu key (right) MENY (höger knapp) <ul style="list-style-type: none">Återgår till föregående menyAktiv. Sekretess under samtalRaderar ett felaktigt tecken
	Star key Asterisk (i tangentbordet) <ul style="list-style-type: none">Tryck och håll ned för att låsa och låsa upp knapplåsetStartar ett konferenssamtal


	Signal Strength icon Signalstyrka <p>Visar aktuell signalstyrka när telefonen är påslagen. Fler balkar = starkare signal. När avståndet är för stort blinkar ikonen.</p>
	Line icon Linje <p>Telefonen är uppkopplad på linjen</p>
	Hands-free Högtalare <p>Högtalarfunktionen är aktiv</p>
	New Call icon Nytt samtal <p>Ett (flera) nytt samtal är missat</p>
	Key Lock icon Knapplås <p>Knapplåset är på (aktivt)</p>

1) Tekniska data

- 10 snabbvals-knappar (22 x 18 mm) för egeninlagda telefonnummer i basenheten.
- Telefonbok med 50 telefonnummer i handenheten.
- Stora, belysta tangentbordsknappar - 12 x 12 mm.
- Reglerbar lurvolym i 5 steg.
- Högtalande med reglerbar volym
- Reglerbar (5 lägen) ringsignal.
- Inbyggd nummerpresentation.
- Maximal räckvidd 80 meter.
- Vid endast batteridrift (max): Vila: 150 tim. Samtal: 6 tim.
- Svenska menyer finns f.n. inte.*

OBS! Vid oklarheter - se originalbruksanvisningen som medföljer!

2) Inkoppling/start

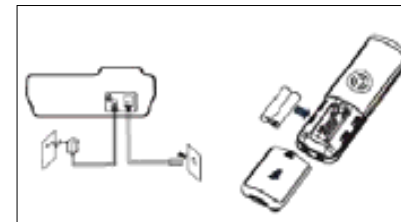

- Sätt i de medföljande laddningsbara batterierna i handenheten. Se bilden ovan.

På basenhetens baksida:

- Anslut nätadaptern till basenheten och ett vägguttag.
- Anslut telesladden till ett telejack/telefonuttag på modemmet (det måste finnas ett abonnemang för telefon) och modularuttaget på baksidan.

- Sätt handenheten på sin plats i basenheten. Ett kort pip hörs. Batterisymbolen på skärmen visar att laddning pågår. Laddning måste göras upp till 15 timmar för full kapacitet. Laddningen är automatiskt reglerad. Full kapacitet visas med att alla fält är svarta. Laddning sker automatiskt när handenheten är placerad i basenheten.
- Handenheten söker upp basenheten automatiskt så att förbindelse finns mellan enheterna.
- Sätt på telefonen genom att trycka ned och hålla knappen "Linje av/PÅ - AV" c:a 5 sek.

3) Menyer

HANDENHET-HS; BASENHET-HS

- Alarm - se orig-brux, sid 18
- Audio - Ljudinställning
- Ringer - Ringsignal
- Tone - Ton - se orig-brux, sid 22
- Language - Språk (menyer)
- HS Name - se orig-brux, sid 24
- Auto Answer - Autosvar
- LCD Contrast - LCD-skärm
- Date & Time - Datum och tid
- Select Base - se orig-brux, sid 30
- HS Reset - se orig-brux, sid 31
- Terminate HS -se orig-brux, sid 32
- Dial Mode - se orig-brux, sid 33
- Flash Time - se orig-brux, sid 34
- Modify PIN - se orig-brux, sid 35
- BS Reset - se orig-brux, sid 36
- Caller ID Book -se orig-brux, sid 46
- Phone Book - se orig-brux, sid 50-56

Fortsättning på nästa sida!

4) Språk

Sidan 24 i originalbruksanvisningen.

1. Tryck på vänster menyknapp.
2. Bläddra med till *HS SETTING*.
3. Tryck på vänster menyknapp.
4. Bläddra med till *LANGUAGE*.
5. Tryck på vänster menyknapp.
6. Bläddra med för att välja språk, t ex engelska. Svenska finns f.n. inte.
7. Tryck på vänster menyknapp eller vänta 30 sekunder.

5) Datum och tid

Sidan 27-29 i originalbruksanvisningen.

DATUMFORMAT

1. Tryck på vänster menyknapp.
2. Bläddra med till *HS SETTING*.
3. Tryck på vänster menyknapp.
4. Bläddra med till *DATE & TIME*.
5. Tryck på vänster menyknapp.
6. Tryck igen på vänster menyknapp. för att välja *DATE FORMAT*.
7. Tryck igen på vänster menyknapp.
8. Bläddra med för att välja *DD-MM* eller *MM-DD*.
9. Tryck på vänster menyknapp eller vänta 30 sekunder.

TIDFORMAT

1. Tryck på vänster menyknapp.
2. Bläddra med till *HS SETTING*.
3. Tryck på vänster menyknapp.
4. Bläddra med till *DATE & TIME*.
5. Tryck på vänster menyknapp.
6. Tryck igen på vänster menyknapp. för att välja *TIME FORMAT*.
7. Tryck igen på vänster menyknapp.
8. Bläddra med för att välja *12-Hour* eller *24-Hour*.
9. Tryck på vänster menyknapp eller vänta 30 sekunder.

STÄLLA IN DATUM OCH TID

1. Tryck på vänster menyknapp.
2. Bläddra med till *HS SETTING*.
3. Tryck på vänster menyknapp.
4. Bläddra med till *DATE & TIME*.

5. Tryck på vänster menyknapp.
6. Bläddra med till *SET DATE* eller *SET TIME*.
7. Tryck på vänster menyknapp.
8. Med tangentbordet skrivs de aktuella siffrorna in.
9. Tryck på vänster menyknapp eller vänta 30 sekunder.

6) Ringa ett samtal

Sidan 37 i originalbruksanvisningen.

1. Lyft ur handenheten från basenheten.
2. Tryck på *Linje* på knappen.
3. När kopplingston hörs, slå önskat telefonnummer på tangentbordet.
4. Avsluta samtal med *Linje* av knappen.

ALTERNATIVT SÄTT:

1. Lyft ur handenheten från basenheten.
2. Slå önskat telefonnummer på tangentbordet.
3. Tryck på *Linje* på knappen.
4. Avsluta samtal med *Linje* av knappen.

FELSLAGNING AV SIFFROR:

- Tryck kort på höger menyknapp för att radera en siffra. Slå ny siffra.
- Tryck på höger menyknapp längre än 1 sekund för att radera alla siffror och återgå till viloläget.

JUSTERING AV LURVOLYMEN

- Under pågående samtal, tryck på för att justera ljudvolymen i luren - 5 steg mellan 0 - 12 dB.

7) Svara på samtal

Sidan 38 i originalbruksanvisningen.

Om tjänsten *nummerpresentation* finns visas uppringande nummer på skärmen.

1. Lyft ur handenheten från basenheten. och tryck på *Linje* på knappen. Om autosvar är aktiv är det bara att lyfta ur handenheten. *Se punkt 14!*
2. Avsluta samtal med *Linje* av knappen.

JUSTERING AV RINGSIGNAL:

- När det ringer, tryck på för att justera ringsignalstyrkan.

8) Högtalande

Sidan 38 i originalbruksanvisningen.

Högtalande funktion kan aktiveras före och under ett samtal.

1. Tryck 2 ggr på *Linje* på knappen.
 2. När kopplingston hörs, slå önskat telefonnummer på tangentbordet.
 3. Avsluta samtal med *Linje* av knappen.
- Under pågående samtal tryck en gång på *Linje* på knappen. Tryck en gång till och samtalet återgår till luren.

9) Ljudinställning

Sidan 19 i originalbruksanvisningen.

1. Tryck på vänster menyknapp.
2. Bläddra med till *HS SETTING*.
3. Tryck på vänster menyknapp.
4. Bläddra med till *AUDIO SETUP*.
5. Tryck på vänster menyknapp.
6. Bläddra med för att välja *SPEAKER VOL* eller *EARPIECE VOL*.
7. Bläddra med för att välja önskad ljudnivå (5 nivåer finns).
8. Tryck på vänster menyknapp eller vänta 30 sekunder.

10) Lagra snabbval

Sidan 57 i originalbruksanvisningen.

- Det finns 10 snabbvalsknappar med bilder i basenheten. Egna bilder kan ersätta de som finns med från början. Skjut in en bild (pillrigt).

1. Låt handenheten vara kvar i basenheten och tryck på knappen (MEMO) *Lagra snabbval* i basenheten. På skärmen visas ett antal streck.
 2. Slå numret med bildtangenterna som är märkta MO - M9. Streck byts ut med de slagna siffrorna.
 3. Tryck på *Lagra snabbval* igen och där-efter på den bildknapp numret ska ligga. Streck visas som bekräftelse.
- När ett telefonnummer lagras på en snabbvalsknapp, skrivs ett eventuellt befintligt nummer över.

- Alla lagrade nummer kan raderas på en gång genom att hålla *Lagra snabbval* nedtryckt tills en text *Del All* visas på skärmen i basenheten.

11) Ringa med snabbval

Sidan 57 i originalbruksanvisningen.

1. Lyft ur handenheten från basenheten.
2. Tryck på *Linje* på knappen. När kopplingston hörs, tryck på önskad bildknapp. Numret slås automatiskt.
4. Avsluta samtal med *Linje* av knappen.

12) Återuppringning

Sidan 40 i originalbruksanvisningen.

1. Lyft ur handenheten från basenheten.
2. Tryck på och på *Linje* på knappen.

13) Sekretess

Sidan 39 i originalbruksanvisningen.

1. Under pågående samtal tryck på höger menyknapp, vilket stänger av mikrofonen. *CALL MUTED* visas.
2. Tryck på höger menyknapp igen för att koppla in mikrofonen igen.

14) Autosvar

Sidan 25 i originalbruksanvisningen.

Autosvar gör att inkommande samtal kopplas upp när handenheten lyfts upp.

1. Tryck på vänster menyknapp.
2. Bläddra med till *HS SETTING*.
3. Tryck på vänster menyknapp.
4. Bläddra med till *AUTO ANSWER*.
5. Tryck på vänster menyknapp.
6. Bläddra med för att välja *ON* eller *OFF*.
7. Tryck på vänster menyknapp eller vänta 30 sekunder.

15) LCD skärmen

Sidan 25 i originalbruksanvisningen.

Det finns 17 kontrastlägen för skärmen.

1. Tryck på vänster menyknapp.
2. Bläddra med till *HS SETTING*.
3. Tryck på vänster menyknapp.

4. Bläddra med till *CONTRAST*.
5. Tryck på vänster menyknapp.
6. Bläddra med för att välja bland de 17 kontrastnivåerna.
7. Tryck på vänster menyknapp eller vänta 30 sekunder.

16) Ringsignal

Sidan 20 i originalbruksanvisningen.

Det finns 10 ringtonssignaler att välja på.

1. Tryck på vänster menyknapp.
2. Bläddra med till *HS SETTING*.
3. Tryck på vänster menyknapp.
4. Bläddra med till *RING SETUP*.
5. Tryck på vänster menyknapp.
6. Bläddra med för att välja *INTRING/EXTRING*.
7. Tryck på vänster menyknapp.
8. Bläddra med för att välja *MELODY*. Bläddra med för att välja önskad ton/melodi (1-10).
9. Tryck på vänster menyknapp eller vänta 30 sekunder.

17) Ringsignalvolym

Sidan 21 i originalbruksanvisningen.

Det finns 5 signalernivåer samt avstängt.

1. Tryck på vänster menyknapp.
2. Bläddra med till *HS SETTING*.
3. Tryck på vänster menyknapp.
4. Bläddra med till *RING SETUP*.
5. Tryck på vänster menyknapp.
6. Bläddra med för att välja *INTRING/EXTRING*.
7. Tryck på vänster menyknapp.
8. Bläddra med för att välja *VOLUME*. Bläddra med för att välja önskad nivå (1-5 + OFF).
9. Tryck på vänster menyknapp eller vänta 30 sekunder.

Snabbguiden kan bara ta upp de viktigaste funktionerna.

Se originalbruksanvisningen för vidare information!

Kontakta oss om du har frågor.