



Analog klocka SVEA

Modell:

TalkTech 51112

O Artnr 3838

Storlek: 43x38x14 mm

Boettstorlek: 30 mm

Vikt: 48 gram

Batteri: 1 st CR2032

(Lithium)

Modell:

TalkTech 51113

O Artnr 3839

Storlek: 38x33x14 mm

Boettstorlek: 25 mm

Vikt: 40 gram

Batteri: 1 st CR2032

(Lithium)

OBS! Du måste själv ändra mellan sommar- och vintertid!

1) Starta uret

Uret levereras avstängt.

Håll uret emot dig. På klockhusets högra sida finns en knapp (se bilden), "TALKNAPP". Håll den intryckt i 3 sek. så startar uret med ett pip.

2) Stänga av uret

Tryck in knappen "TALKNAPP" i 5 sek. och uret tystnar. Analogt verket stängs inte av.

Läs rutan här nedan!

OBS!

Om du trycker "för länge" på Talkknappen stängs ljudet av. Tryck igen på Talkknappen, tills det piper till och ljudet är på igen!

OBS! - VIKTIG INFORMATION OM ARMBANDSURET!

Boetten är skyddad mot nickelallergi. Medföljande läderarmband är fritt från latex. Klockorna är inte vattentäta eftersom de har en öppning för högtalaren. Undvik därför att ha den på dig när du duschar, badar, diskar eller kommer i kontakt med andra vätskor. Garantin täcker inte sådana fel vid användning.

3) Ställa in tid

Håll uret emot dig.

ANALOGA VERKET

Dra försiktigt ut kronskruven och "pilla bort" den lilla röda plastbiten under kronskruven och ställ in tiden. Tryck sedan åter in kronskruven.

DIGITALA VERKET

MED TAL

På verkets vänstra sida finns ställknappen K2 för inställning av timmar, resp. högra sidan ställknappen K3 för minuter.

Knapparna är infällda, så du måste använda ett spetsigt föremål för att trycka in.

Klockorna är CE-märkta. Batteriets livslängd beror på hur ofta du aktiverar talfunktionen. Ett nytt batteri klarar ca 1 års drift vid "normal" användning. Batteribyten kan göras hos urmakare eller hos oss. Garantin för tillverkningsfel är 1 år. Om klockan öppnats och inte hanterats på ett fackmannamässigt sätt gäller inte garantin.

Högtalaren sitter på undersidan



K1 Tal-knapp

K2 Ställ: Timmar

Inställning -analogt ur

K3 Ställ: Minuter

Ställknapparna är infällda.

Tryck på Talkknappen för att läsa ut!

4) Välja analog eller digital tidsangivelse

Exempel: Tid kl. 14.15

- Talet kan ange inställd tid *analogt*: "kvart över två på eftermiddagen" - eller *digitalt*: "fjorton och femton".

Ändra inställningen genom att stega runt i 24 timmars intervaller med K2.

Dvs, för att ändra inställning på talet ställer du fram klockan 24 timmar.

5) Intervaller för dygnsangivelse

- Natt till morgon: 05.25
- Morgon till förmiddag: 07.25
- Förmiddag till eftermiddag: 11.25
- Eftermiddag till kväll: 16.25
- Kväll till natt: 22.25

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.