
Bruksanvisning Klockan Klara



Bruksanvisning Klockan Klara

Allmänt:

Klockan Klara är en svensktalande klocka som efter ett tryck på den stora lätttryckta avläsningsknappen talar ut aktuell tid på samma sätt såsom vi människor talar, dvs. klockan säger kvart i .., halv.. , fem över halv.. osv.


Klockan säger även dygnsangivelse t ex morgon, förmiddag, eftermiddag osv.

Klockan enkel att hantera och att sköta. Det finns en ögla och en medföljande halsrem som gör den enkel att bära.

Storleken är 105x57x18 mm.

Batterier ingår och är monterade vid leverans.

Beskrivning av Klockan Klara:

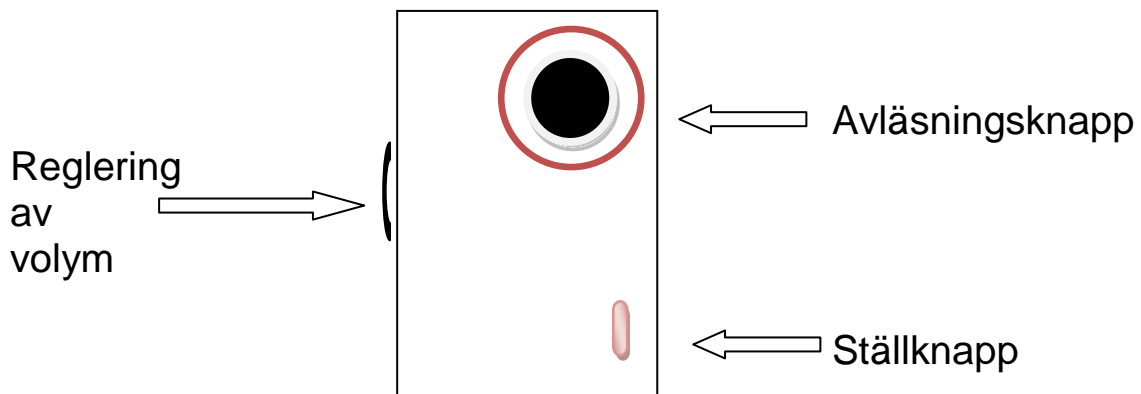

Avläsningsknapp Tryck på avläsningsknappen och Klara läser upp tiden i klartext.

Klockan säger kvart i .., halv.. , fem över halv.. osv.



Klockan Klara säger även dygnsangivelse enligt nedan samt veckodag.

Kl 23 .00 – 5.59 natt

Kl 6.00 – 8.59 morgon

Kl 9.00 – 12.59 förmiddag

Kl 13.00 – 17.59 eftermiddag

Kl 18.00 – 22.59 kväll

Volymreglage: Volym justeras genom att vrida på reglaget på Klockan Klaras vänstra sida.

Ställknapp: Placerad på klockans framsida, svagt markerad med en oval röd yta.

Här ställer du tiden samt veckodag.

OBS! Klockan Klara ändrar ej automatiskt mellan sommar- respektive sommartid.


Ställa Klockan Klara:

1. Tryck på **Ställknappen**. Klara kvitterar med ett kort pip och säger "Ställ timmar" och aktuell timme
2. Stega med **Avläsningsknappen** till aktuell timme.
3. Släpp tillfälligt **Ställknappen**. Tryck ner **Ställknappen** igen. Klara säger "Minuter" och aktuella minuter.
4. Stega med **Avläsningsknappen** till aktuella minuter
5. Släpp tillfälligt **Ställknappen**. Tryck ner **Ställknappen** igen. Klara säger "Dag" och aktuell veckodag.
6. Stega med **Avläsningsknappen** till aktuell dag.
7. Nu är inställningarna klara. Släpp **Ställknappen** och Klara kvitterar med 2 korta pip.

Du kan avsluta inställningarna genom att när som helst under processen släppa **Ställknappen**. Klara kvitterar med 2 korta pip.

Batteribyte:

Klockan Klara drivs av 2 st R03 batterier som är installerade vid leverans. Dessa byts genom att lossa krysskruven till batterifacket på baksidan av klockan med skruvmejsel. Ta ur de förbrukade batterierna. Nya batterier stoppas i batterifacket. Observera polariteten, det översta batteriet pluspol åt höger, det undre batteriet pluspol åt vänster, rätt polaritet står även märkt i lådans botten. Vid felaktig batteriisättning blir batterierna varma och förbrukas på en mycket kort stund.

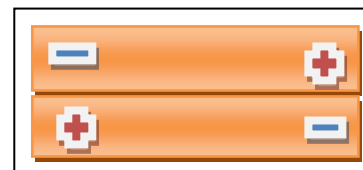

Klara behåller rätt tid helt utan batterier ca: 5 minuter.

Underhåll och service:

Klara behöver inget underhåll förutom batteribyte. Vid kassaktion avlägsnas batteriet som lämnas till särskild batteri insamling. Klara återlämnas till inköpsstället för återvinning och miljöhänsyn. Vid behov av service kontakta Iris Hjälpmedel AB (gäller särskilt under garantitiden). Vid senare behov av service går det också bra att kontakta tillverkaren Sankt Anna Elektronik.

Vi hoppas att du skall få mycken nytta av din talande klocka Klara!

Iris Hjälpmedel AB
Sandsborgsvägen 52
122 88 Enskede
Tel. 08-39 94 00

Sankt Anna Elektronik
Övre Lagnö 2
614 98 Sankt Anna
Tel. 0121-513 65