

AKK-programmet PRC SoftVantage



SoftVantage är PRC's nyaste AKK-program på CD för syntetiskt och inspelat (digitaliserat) tal för användning i valfri modell av PC med Windows 98/ME/2000/XP. Det är en fördel om färgpekskärm används för att välja tangentrutor. SoftVantage kan även styras med en eller flera manöverkontakter, mus/huvudmus/musersättare.

SoftVantage med talsyntes kan provas fullt ut under 30 dagar efter installation utan kostnad. Kontakta oss och beställ ditt provexemplar på CD (Gratis!). Ring eller se vår hemsida! (OBS! Efter 30 dagar upphör talet. För att åter göra installationen talande måste licens köpas för såväl SoftVantage som talsyntesen.)

SoftVantage och Ordstrategi/PC är anpassade till svenska och kan bli en utmärkt startplattform för det barn, ungdom eller vuxen som ska börja använda AKK för att kommunicera talande. Det går också att använda SoftVantage i PRC talapparaterna Vantage och Vanguard, som erbjuder fler möjligheter, bl a IR-fjärrstyrning, inbyggd huvudmus TRACKER mm. Kontakta oss för mer information!

SoftVantage kan även vara fortsättningen för den person som visat sig framgångsrik vid användning av manuella symbolkartor eller talapparater av enklare slag med begränsad kapacitet.

SoftVantage är flexibel och lätt att individanpassa och lätt att arbeta med när det gäller fortsatt stöd och underhåll av AKK-innehållet med *grundordförråd*, *sidor* och *aktiviteter*.

- Du väljer själv vilken datortyp som ska användas.
- Du väljer själv storlek på färg/färgpekskärm. Du bör dock inte välja en skärm som är mindre än 7,5" (19,1 cm diagonalt), för att få enkel avläsning och styrning.
- Styrning görs med direktval på pekskärmen, scanning eller mus/huvudmus/musersättare.
- Textfält finns för att visa de ord och meningar som skrivits in.
- Dynamisk *aktivitetsrad* ger åtkomst till utökat ordförråd.
- Dessutom *sidor* för ännu större ordförråd.
- Seriell till USB adapter finns för anslutning av manöverkontakter vid scanning.
- SoftVantage kan användas med inspelat tal, men för att få full funktionalitet och oberoende, *ska* talsyntes användas. Vi rekommenderar Infovox Desktop Standard eller PRO. I SoftVantage ingår som standard även de engelsktalande synteserna MIKE och MARY.
- SoftVantage's ordförråd med bilder är inladdade och är färdiga för direkt användning.
- Mer än 2 500 Minspeak-symboler i färg med svensk definition ingår. Även flera tusen Minspeak-symboler från andra språkgrupper ingår. Dessutom ingår 3 900 PCS färgsymboler med svensk definition.

Med SoftVantage går det lätt att snabbt börja kommunicera, samtidigt som den tillåter brukaren att bygga upp sina kommunikations- och språkfärdigheter för framtiden...



PRC står för Prentke Romich Company, USA - världens största företag inom AKK-området. I Sverige har vi sedan 1989 använt PRC talapparater som IntroTalker, TouchTalker, LightTalker, Walker Talker, AlphaTalker, SideKick och DeltaTalker. Nu kommer den nya generationen talhjälpmedel, som *SpringBoard Plus* och *SoftVantage* (för användning i vanliga PC med Windows och talsyntes, t ex Infovox Desktop Standard eller PRO). **AKK=A**lternativ och **K**ompletterande **K**ommunikation.



Ordstrategi för SoftVantage




Enspännargatan 10
165 57 Hässelby

Tel: 08-583 588 90
Mobil: 0708-35 88 91
FAX: 08-583 603 99
info@rehabmodul.se

www.rehabmodul.se
För senaste information.

Bilden visar skärmens generella utformning.

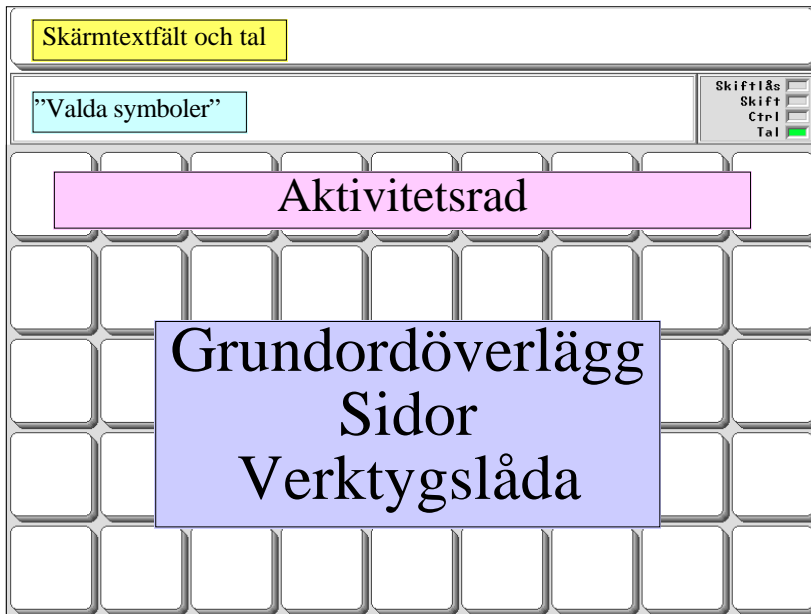

SoftVantage - inte bara bildkommunikation

- Om "Stava ett ord" är på, kan du i Minspeak-läget välja rutan "ABC stava". Nu kan du skriva ett önskat ord, göra mellanslag och automatiskt komma tillbaka till Minspeak.
- Om "Ordprediktion" är på kan du i samband med skrivning av text få ordprediktion. C:a 6000 svenska ord ingår. Ord kan läggas till och tas bort.



Mer om SoftVantage...

SoftVantage är utformad för att vara ett effektivt talhjälpmedel för alla brukartyper, med varierande behov av val- och inställningsmöjligheter.

- Rutstorlekar från stora rutor i 4 rutors arrangemang upp till 8, 15, 45 eller 84 rutor på skärmen.
- 6 minnesareor gör det möjligt att skapa olika ordförråd för en eller flera personer i samma program eller skapa och lagra flera utprovings- och träningsordförråd för olika brukare.
- En uppsättning "färdiga" övningar, demos samt (45 rutor) Ordstrategi/PC 1-rutsval, Ordstrategi/PC 2-rutsval och Ordstrategi/PC 3-rutsval, ingår vid leverans. *84 rutor är helt nytt och endast amerikanska exempel finns för närvarande.*

Dessutom finns bl. a. dessa funktioner i SoftVantage:

- Tangent-INFO; Symbolprediktion; Prediktivt val.
- Enkla menyer för import av ordförråd och bilder/symboler.
- Ordförrådet - grundordförråd, sidor & aktiviteter - kan exporteras/delas av andra brukare av SoftVantage.
- Ordförråden kan lagras och modifieras på en PC.
- Aktivitetsrader och sidor är organiserade så att fler ord kan läggas till eller anpassas med en struktur som förenklar utläsning av ord. De mest frekvent använda orden ingår i aktivitetsraderna och sidorna.
- Textfältet på SoftVantage's dynamiska skärm visar ordet eller frasen som hör ihop med varje symbol. Textfältet kan hjälpa till i utveckling av brukarens läs- och skrivförmåga.
- Fraser och meningar kan repeteras efter att de valts första gången genom att "trycka" på eller välja textfältet igen. Denna funktion sparar tid och tålmod.
- Rutor kan färgkodas för att underlätta inläring och lättare hitta rätt.
- Symboler kan döljas av terapeuten/läraren, för att göra det möjligt för brukaren att fokusera på enskilda symboler eller ordgrupper, för att underlätta inläring.
- SpringBoard Plus's intalade ordförråd kan föras över till PRC SoftVantage, så att den brukare som är mogen att börja med ett större ordförråd enkelt och snabbt kan komma vidare i denna, mer avancerade plattform, utan att förlora uppnådda färdigheter i SpringBoard Plus.
- Särskild vikt har lagts ner på att menyer, verktyg och funktioner, så långt möjligt, är lika i såväl SoftVantage som SpringBoard Plus, för att underlätta övergångar mellan olika talapparater och system.





Inlagrade ordförråd

Det finns ordförråd inlagrade i SoftVantage när du köper den. T ex en demo med 7 ordförråd med 4, 8, 15 rutor och tre med grundordförråd enligt Minspeak för 45 rutor, inklusive sidor och aktiviteter. Dessutom ordförråd med pektest och bildtest.

4/8/15 DEMO

4 rutors demo är främst avsedd för de mindre barnen.

4CHILD SIDA






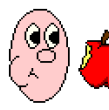


 jag	 leka
 äta	 sjunga

4 SMÅBARN

Ett 4 rutors ordförråd på enbart sidor och 1 ruts val, som ger exempel på ord/ fraser för att leka, läsa, sjunga och vanliga fraser. Stora tangenter gör det lätt att välja. Det här ordförrådet kan du använda som grund för att lägga till nya ord och fraser etc. *Ingenting är låst!*

8 Barn demo är främst avsedd för förskolebarn.

8CHILD SIDA









 jag vill	 leka..	 hjälp	 MER
 vill åka	 äta..	 lite mer	 sluta

8 BARN

Ett 8 rutors ordförråd på enbart sidor och 1 ruts val, där brukaren kan träna i att bygga upp enkla meningar - ett väsentligt steg för att i framtiden kunna kommunicera spontant. Det här ordförrådet kan du använda som grund för att lägga till nya ord och fraser etc. *Ingenting är låst!*

8 Ungdom demo är främst avsedd för barn i skolåldern som behöver stora rutor.

8TALK SIDA

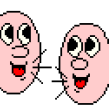
 vill	 hjälp	 åka	 MER
 nänä	 känner	 kommentar	 frågor

8 UNGDOM/8 VUXNA/8 SCA/INFO

8 rutors ordförråd på enbart sidor och 1 ruts val, där brukaren introduceras i metodiken i meningsbyggnad. En blandning av fraser och enkelord ger viss flexibilitet för att skapa nya meningar eller meddelanden. De här ordförråden kan du använda som grund för att lägga till nya ord och fraser etc. *Ingenting är låst!* 8 SCA/INFO har ord och fraser ordnade för att bättre passa scanning.

15 UNGDOM/15 VUXNA

För de brukare som klarar av att använda ett 15 rutors rutsystem med enbart 1 ruts val, kan de här ordförråden användas och de innehåller de vanligaste orden samt mindre frekventa ord på speciella sidor. Brukaren väljer önskade ord för att göra meningar eller meddelanden. Här ingår speciella sidor för skola, hälsa och fritid/nöjen. De här ordförråden kan du använda som grund för att lägga till nya ord och fraser etc. *Ingenting är låst!*

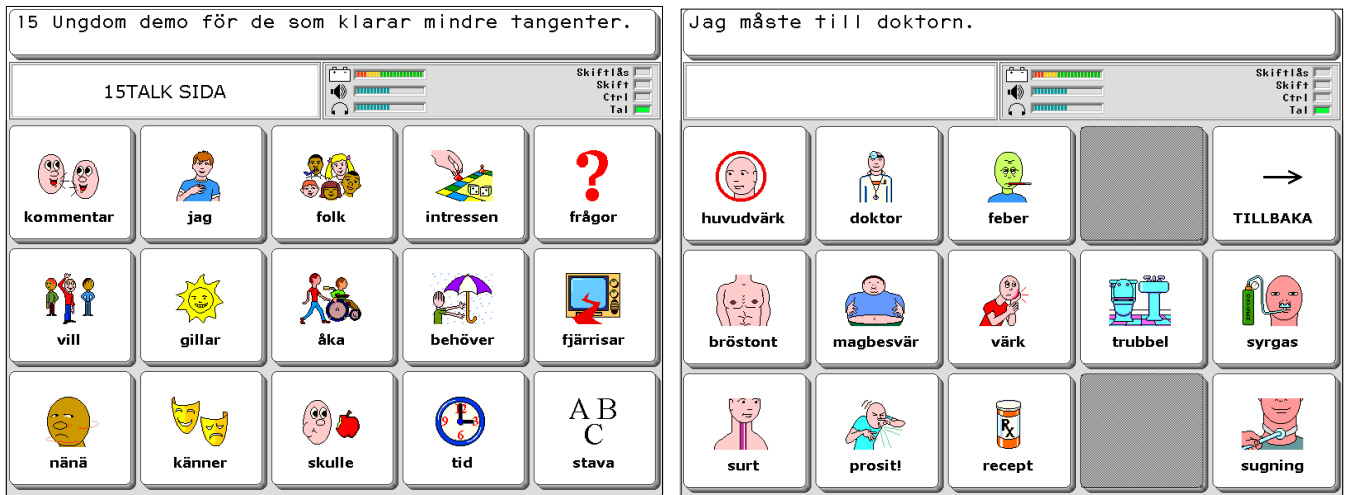

Observera!

Du kan förstås göra överlägg med Minspeak sekvenser även på 4, 8, 15 och 84 rutors överlägg.

45 rutors ordförråd

Med 45 rutor finns här Grundöverlägget, dvs Minspeak överlägget. Du kan välja på 1 ruts val, 2 ruts val och för de mer avancerade användarna, 3 ruts val. Det här är Minspeak!

Ordförrådet innehåller ord och fraser, som används ofta i dagligt tal - oavsett situation. Även om Aktivitetsraden ändras ofta när du väljer ord i grundordförrådet, är grundordförrådet inte ändrat - om du inte själv gör ändringar, vilket du kan. *Ingenting är låst!*

Aktivitetsraden

Aktiviteterna finns på översta raden, under Skärmtextfältet. Aktiviteter är alltid enkelval. De kan även kopplas ihop med andra begrepp, t ex rutor eller symbolsekvenser på överlägget för grundordförrådet, för att göra dem dynamiska med automatik.

Aktiviteter innebär att du kan få fram ord/meddelanden som berör ett visst ämnesområde. Även fast du använder Aktiviteter kan du ändå direkt använda dig av ditt Grundordförråd på överlägget.



• Statiska aktiviteter

När en aktivitet är fast i Aktivitetsraden, kallas den för statisk aktivitet. En dynamisk aktivitet kan tillfälligt dölja en statisk aktivitet, tills den är vald.

• Dynamiska aktiviteter


När en aktivitet visas i Aktivitetsraden, som resultat av ett val i grundordförrådet, kallas den för dynamisk aktivitet. Den dynamiska aktiviteten visas, tills den är vald. Därefter visas åter den statiska aktiviteten.

Sidor

Sidor är ett slags överlägg, som du antingen skapar själv eller som medföljer talapparaten vid leveransen. Sidor kan ha ett innehåll för speciella eller generella ämnesområden och tillämpningar. Sidor kan göras i alla förekommande standardtangentsstorlekar. Sidor har ingen aktivitetsrad och varje ruta på en Sida väljs med enkelval (inga sekvenser). Du kan se Sidor som en "större aktivitet". I princip är hela 4/8/15 Demo uppbyggt med enbart sidor.

45-rutors ordförråd med 1 ruts val

45 rutors ordförråd erbjuder en större startupsättning av ord. Ett antal sidor och aktiviteter är förlagrade.

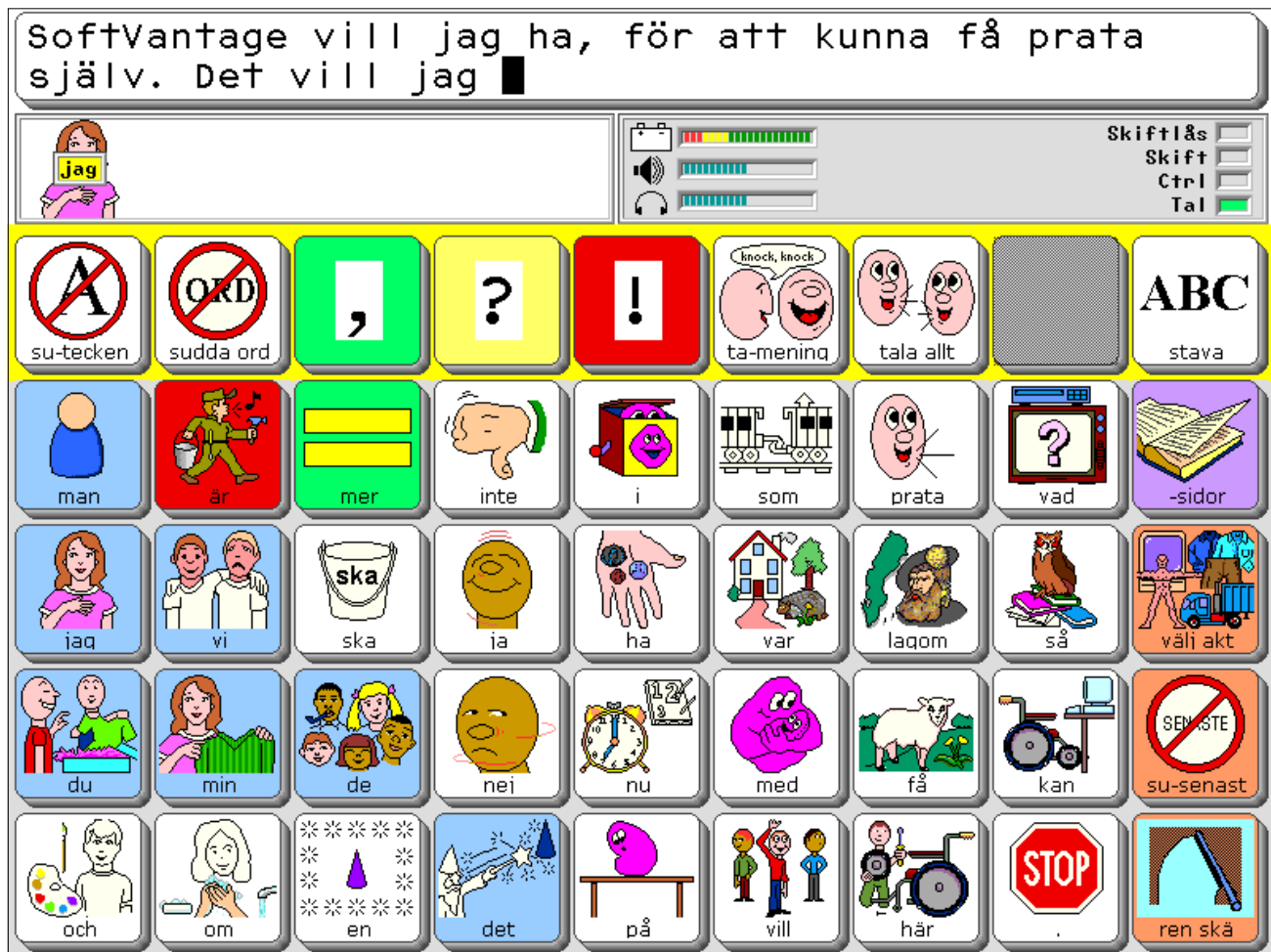

4, 8, 15, 45 eller 84 rutor?

I denna första version av Ordstrategi/PC för SoftVantage, finns det inlagrade tillämpningar, som du direkt kan börja använda dig av.

Vi - och förhoppningsvis även andra - kommer att försöka arbeta vidare med fler tillämpningar. En del kommer att vara gratis och finnas tillgängliga på vår hemsida, medan andra, större tillämpningar kräver att vi måste ta ut en kostnad.

Vi kan dock alltid erbjuda vår medverkan att sprida era arbeten till andra, genom nerladdning från vår hemsida eller att de finns med på vår Support CD.

För en del användare, speciellt de som har tidigare erfarenheter av talande hjälpmedel, kan det vara lämpligt att direkt börja med 45 rutors eller 84 rutors överlägg, med 1-, 2- eller 3-symbolsekvenser och många sidor och aktiviteter.

Priser för SoftVantage och tillbehör

Alla priser anges exklusive moms, som tillkommer. Frakt tillkommer vid köp av enbart tillbehör. Priser och villkor gäller från 2005-01-01, tills annat meddelas.

Det är viktigt att ha i minnet att ett köp av SoftVantage med Ordstrategi/PC även innebär väsentliga arbetstidsbesparingar för berörda personalgrupper. Att ta fram ett överlägg, bilder och ordförråd kan innebära 100 tals timmar av arbete för en, enda brukare. Detta arbete är redan gjort här och tiden kan istället användas för att träna brukarna individuellt och göra anpassningar, modifieringar eller tillägg!

Standardutförandet

Standardutförandet av SoftVantage med Ordstrategi/PC för valfri PC med Windows 98/ME/2000/XP, exklusive svensk talsyntes, svensk version på CD, inkluderar: "Bruksanvisning Svenska SoftVantage" (pdf); "Komma igång med SoftVantage med Ordstrategi/PC" (papper/pdf); "Handledaren - Ordstrategi/PC" (pdf); Support materiel på CD. SoftVantage har 3 års gratis uppgradering. Komplettera med svensk talsyntes. Det går att använda en SAPI 4.0 kompatibel talsyntes, t ex Infovox 330/Desktop/Desktop Standard V2/ Desktop PRO V2, m fl. *Artikelnummer 8351. Pris: 19 950:-*

Alternativa utföranden

Alternativ anges i samband med beställningen:

- *SoftVantage med Ordstrategi/PC och talsyntesen Infovox Desktop Standard V2 med rösten "Ingmar". Artikelnummer 8352. Pris: 23 950:-*
- *SoftVantage med Ordstrategi/PC och talsyntesen Infovox Desktop Standard V2 med rösten "AnnMarie". Artikelnummer 8353. Pris: 23 950:-*
- *SoftVantage med Ordstrategi/PC och talsyntesen Infovox Desktop PRO V2 med rösten "Emma". Artikelnummer 8354. Pris: 24 550:-*

Tillbehör till SoftVantage

Följande tillbehör kan beställas i samband med köpet eller i efterhand:

- *Seriell till USB adapter, inkl 4 x 3,5 mm phonoplug till seriell adapter (för manöverkontakter) Artikelnummer 8361. Pris: 790:-*
- *Adapter, 4 x 3,5 mm phonoplug till seriell adapter (för manöverkontakter), 13041 Artikelnummer 8362. Pris: 390:-*

Pekskärmar/datorer med pekskärm

Kontakta oss för mer information och rådgivning!