



# Bruksanvisning Talande fotoalbum A5, A4 och A3



A5-format (6 st)  
Artnr: 3508

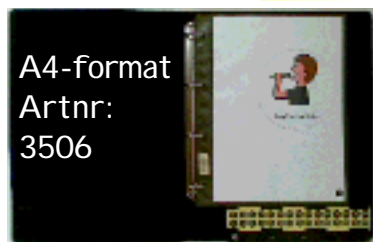

A4-format  
Artnr:  
3506

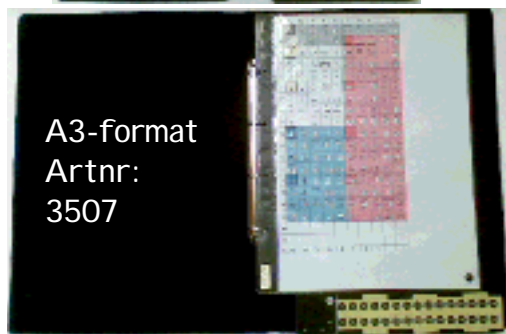

A3-format  
Artnr:  
3507

Talande fotoalbum i format A5, A4 resp. A3 med 30 meddelanden på högst 10 sekunder för varje bild (totalt 5 minuter). De kan användas för intalat träningsmaterial, minnesstöd, meddelanden, AKK, steg-för-steg instruktioner, mm. Talapparaten är separat men en integrerad del av albumet.



**RESET - knappen**  
Om det inte fungerar som det ska, tryck på knappen i Reset-hålet för att återställa (=återstarta).



Batterierna sätts in som på bilden.  
+ ---- -  
- ---- +

## Märk upp bildfickorna

Märk upp bildfickorna med de självhäftande siffrorna som medföljer. Sätt i bildmaterial med anknytning till det som ska sägas.

**Avfallshantering**  
Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

## Spela in meddelanden & Spela över meddelanden

- Sätt först **PLAY/REC** knappen i läge **REC**.
- Tryck på **REC** tangenten på framsidan samtidigt som du trycker på en meddelandeknapp. Du håller knapparna intryckta under hela inspelningen. Den röda lysdioden tänds.
- Tala in i mikrofonen (MIC). Varje ruta kan spela in ett meddelande på högst 10 sek. Inspelningsnivån är autoreglerad.
- Låt tiden gå ut (lysdioden släcks) eller avsluta inspelningen genom att släppa båda tangenterna. Fortsätt att spela in. När du är klar - sätt **PLAY/REC** knappen i läge **PLAY**.

## Läsa upp meddelanden

Tryck på önskad meddelandetangent och inspelat meddelande läses upp. Ingen volymkontroll - anpassa därför inspelningarna till de förhållanden som de ska användas under.

## Ta bort meddelanden

Föl proceduren enligt ovan, men tala inte in något meddelande!

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på grund av tryckfel.

### Installera/byta batterier

Du måste sätta i medföljande batterier, för att använda talapparaten. Batterifacket sitter på talapparats högra kortsida. När ljudet inte låter bra är det tecken på att batterierna behöver bytas. Byt alltid alla batterierna vid samma tillfälle!

- För att sätta i/byta batterierna, lossar du skruven och tar bort luckan (och tar bort de gamla batterierna). Sätt i två nya 1,5 volt alkaline batterier av typ LR03 / AAA (se bilden ovan). Sätt tillbaka luckan och skruva fast skruven.

