

Bruksanvisning

Attainment Time Cue™

1 meddelande - högst 10 sekunder. Kan även användas som en alarmklocka med ljudsignal i stället för ett inspelat meddelande. En bild i formatet 74 x 55 mm kan placeras på insidan av det ihopfällbara locket. Fickstorlek. 4 stycken SR44 batterier ingår.

• Byta batterier

För att byta batterier - skjut och ta bort det guldfärgade bakstycket. Ta sedan bort batterifacket's lucka. Ta bort de gamla batterierna. Sätt in 4 nya SR44 silveroxid*) batterier, med plus-polerna riktade uppåt. Du ska alltid byta alla batterier vid samma tillfälle! När batterierna är på plats ska klockan synas på skärmen. Om inte - är batterierna felaktigt isatta eller dåliga.

• Ställa klockan

1. Sätt omkopplaren **TIME/RUN/CUE** i läge **TIME**.
2. Tryck upprepade gånger på (eller håll intryckt) knappen **hour** tills önskad timme visas.
3. Tryck upprepade gånger på (eller håll intryckt) knappen **MINUTE** tills önskad minut visas.
4. Sätt omkopplaren **TIME/RUN/CUE** i läge **RUN**.

OBS! Endast 12 timmars klocka. AM motsvarar 00.00-12.00 resp PM motsvarar 12.00- 24.00

• Spela in ett meddelande

1. Tryck på och håll nere knappen **REC**. Den röda lysdioden lyser så länge det finns inspelningstid. På skärmen anges inspelningstiden i sekunder - högst 10 sekunder.
2. Tala in ett meddelande i mikrofonen. Mikrofonen är placerad till höger om lysdioden - **MIC** tangenten. Avståndet mellan mun och mikrofon bör vara högst 10 cm.
3. Släpp knappen **REC** för att avsluta inspelningen.

OBS! Upprepa punkterna 1 - 3 för ett nytt meddelande. Ta bort ett meddelande genom att snabbt göra punkterna 1 och 3.

• Ställa alarmtiden

1. Sätt omkopplaren **TIME/RUN/CUE** i läge **CUE**. Förinställd alarmtid och **AL** visas på skärmen.
2. Tryck upprepade gånger på (eller håll intryckt) knappen **hour** tills önskad timme visas.
3. Tryck upprepade gånger på (eller håll intryckt) knappen **MINUTE** tills önskad minut visas.
4. Sätt omkopplaren **TIME/RUN/CUE** i läge **RUN**.

*OBS! Kontroll av inställd alarmtid kan göras med knapparna **hour** eller **MINUTE** när omkopplaren **TIME/RUN/CUE** är i läge **RUN**.*

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.



Sätt in en bild i bildfickan - som passar meddelandet

*) De här batterierna går ofta under benämningen "klockbatterier"/ knappceller. Lämpliga silveroxid-batterier är typerna (varje fabrikant har sitt egna typnummer): SR44, G13, D357, SP357, V357, 357, B-SR44H, SB-B9 m fl.

Läsa upp meddelandet

• **Läsa upp manuellt**
Tryck på knappen **PLAY**.

• **Läsa upp vid inställd alarmtid**
Omkopplaren **OFF/TALK/ALARM** sätts i läge **TALK**. Alarmsymbolen **AL** visas på skärmen. Meddelandet läses upp en gång.

• **Ljudsignal vid inställd alarmtid**
Omkopplaren **OFF/TALK/ALARM** sätts i läge **ALARM**. Alarmsymbolen **AL** visas på skärmen. Signalen hörs under 1 minut.

• **Stänga av alarmet helt**
Omkopplaren **OFF/TALK/ALARM** sätts i läge **OFF**. Alarmsymbolen **AL** visas inte.

