

Rehabmodul AB Snabbguide



GoTalk4+ Lite Touch

©: Rehabmodul AB, 11/2024

Astrakångatan 151 • 165 52 Hässelby • Tel: 070-835 8891 • www.rehabmodul.se

Nivåindikering
gröna
lysdioder

Mikrofon

Högtalare

Direktvals-
tangenter
17 sekunder
på vardera

Meddelande-
tangenter -
Nivå 1: 20 sek.
på varje tangent
Nivå 2 - 5:
10 sek. på varje
tangent

PÅ/AV
knapp

Radera
nivå

RECORD
= spela in

Batterifack



Inspelning
röd lysdiod

Volymkontroller

Byt nivå
tangent

På baksidan av GoTalk
finns en etikett på
engelska som kortfattat
visar de viktigaste
funktionerna och hur de
används.

Inbyggt
hålraster

Skyddsficka i
plast &
Överläggsflik

**Total
inspelningstid
är 4 minuter
och
34 sekunder**

GoTalk4+ Lite Touch
- med lätttryckta tangenter
Artikelnummer: 3202B



Spela in meddelanden

- Sätt på GoTalk med huvudströmbrytaren på baksidan. Läge PÅ (ON) - om den inte redan är på. Ett pip hörs.
- Tryck och släpp **RECORD** tangenten (på baksidan). En grön nivålysdiod (LED) och den röda RECORD-LED ska nu vara tända.
- Medan båda LED lyser - **tryck på och släpp** önskad meddelandetangent. Den röda lysdioden börjar blinka, för att indikera att inspelning nu sker.
- Tala in i mikrofonen, som är placerad under handtaget. När du talat färdigt, tryck på valfri meddelandetangent.
- Fortsätt att spela in varje meddelande på denna eller flera nivåer. När du är klar: Tryck och släpp **RECORD** tangenten (på baksidan).



Läsa ut meddelanden

- Tryck (och släpp) eller glid över (med tryck) på önskad meddelandetangent och inspelat meddelande läses upp. En grön nivålysdiod blinkar samtidigt. **V.G. VÄND!**

Rehabmodul AB Snabbguide



GoTalk4+ Lite Touch

©: Rehabmodul AB, 11/2024

Astrakängatan 151 • 165 52 Hässelby • Tel: 070-835 8891 • www.rehabmodul.se

Nivåer

Ändra nivå


Tryck på nivåknappen en gång. Grön LED visar vald nivå. Tryck upprepat på samma knapp för att ändra till annan nivå. Byt överlägg för att passa till nu vald nivå.

Radera en hel nivå

Tryck och släpp **RECORD** tangenten (på baksidan). Tryck upprepat på nivåknappen fram till den nivå som ska raderas.

Med spetsen på t ex en kulspeppenna, trycks knappen in vid "Erase Level" (på baksidan). Den valda nivån raderas helt. Repetera ovanstående för att radera andra nivåer.

OBS! Denna procedur raderar inga meddelanden, som lagrats under *direktvalstangenterna*.

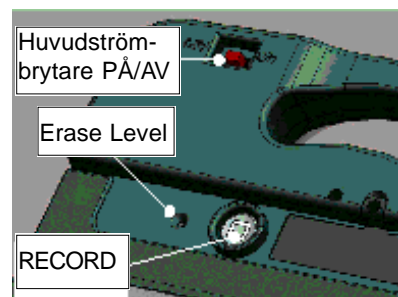

Strömförsörjning

- I läge AV drar GoTalk ingen ström. Vid PÅ - en mycket låg ström i viloläge.
- Drivs med 2 stycken 1,5 volts alkaliebatterier av typ LR6. • Tillverkaren uppger en batterilivslängd på 3 - 6 månader vid normal användning.
- Batterierna finns i batterifacket på baksidan. Luckan är försedd med en skruv.

Funktionslås

Funktionslås används för att förhindra oönskad påverkan av nivåer eller inspelningar.



Förhindra nivåbyte

Aktivera låset genom att hålla **RECORD** (på baksidan) intryckt. Röd RECORD och grön nivå LED tänds. Fortfarande med intryckt **RECORD** tangent, tryck på och släpp knappen **VOLYM NED**. Röd och grön LED släcks, vilket indikerar att låset är PÅ.

Förhindra inspelningar

Aktivera låset genom att hålla **RECORD** (på baksidan) intryckt. Röd RECORD och grön nivå LED tänds. Fortfarande med intryckt **RECORD** tangent, tryck på och släpp knappen **VOLYM UPP**. Röd och grön LED släcks, vilket indikerar att låset är PÅ.

Ta bort låsen:

Stäng av GoTalk med huvudströmbrytaren (på baksidan - läge AV). Håll **RECORD** (på baksidan) intryckt och sätt på GoTalk med huvudströmbrytaren till läge PÅ. De gröna lysdioderna tänds en i taget och den röda tänds helt kort. Även ett pip hörs.

Fack för förvaring av överlägg



Minst ett överlägg för varje nivå, kan förvaras i facket. Överläggen är nu lätt tillgängliga vid byte av nivå.

Användningsområden

GoTalk kan användas i olika aktiviteter. Här är några få exempel:


- Allmän, talad kommunikation.
- Talad kommunikation i vissa sammanhang och miljöer.
- Läsa upp instruktioner och anvisningar i givna sammanhang.
- Träning i användning av ett talande AKK-hjälpmedel.
- Träning av bild- och språkförståelse.

2 direktvalstangenter


Inspelning: Följ samma procedur som för meddelandetangenter. Ett meddelande inspelat på en direktvalstangent kan alltid användas oavsett vald nivå. En ny inspelning läser över den gamla.



De 2 direktvalstangenterna kan anpassas för valfria aktiviteter!

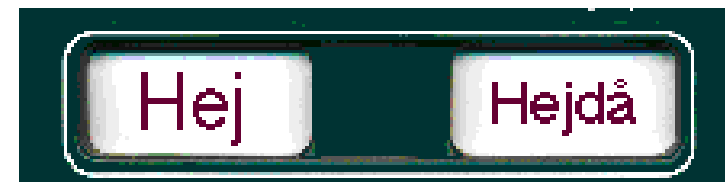

eller?

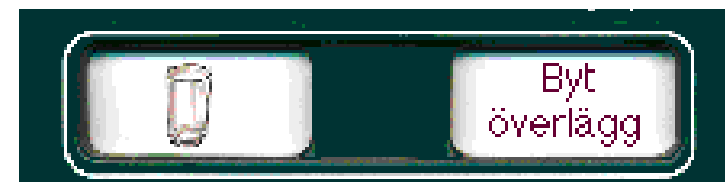

Direktvalstangenterna bör användas för ord och fraser som används ofta. Sociala fraser, t ex hälsningar, kommentarer, frågor etc.

- 4 meddelandetangenter med 5 nivåer var - ger totalt 20 meddelanden.
- 2 direktvalstangenter, som kan användas oberoende av vald nivå.
- Totala inspelningstiden är c:a 4,5 minuter. • Rutstorleken är 87 x 69 mm.
- Inbyggt handtag. • Låg vikt, c:a 600 g. • Formatet är 230 x 300 x 28 mm.
- Inspelade meddelanden är kvar även när batterierna är urladdade eller tagits ur!