

# Rehabmodul AB Snabbguide

**Pretorian**  
TECHNOLOGIES LTD.

# Smooth Talker

Talapparat för träning, lek och kontroll

©: Rehabmodul AB, 04/2011

Enspännargatan 10 • 165 57 Hässelby • Tel: 08-583 588 90 • [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)

Brukarstöd: [support@rehabmodul.se](mailto:support@rehabmodul.se)

## Produktfakta

- Meddelanden kan läsas ut enskilt eller i sekvenser
- Högst 2 minuter inspelningstid, utan begränsning av antalet
- Dubbla, inbyggda högtalare
- Stor (125 mm) och mycket lätttryckt, inbyggd manöverkontakt med låg profil mot användaren
- Arbetsätten är 5: Sekvenser, Slumpvis, Val, Turtagning och Förkontroll
- Uttag, 3,5 mm, mono, för anslutning av yttre manöverkontakt
- Uttag, 3,5 mm, mono, för anslutning och styrning av leksak eller annan klenspänningsapparat
- Försedd med modul för trådlös styrning av in-/ut signaler enligt Pretorian Simply Works system
- PÅ/AV (strömförsöjning) och volymkontroll är av typ tumhjul
- Strömförjs med 1 st 9 volts alkalinebatteri, typ 6F22
- Inbyggd hållare för bildstöd
- Mått: 220 x 180 x 50/27 mm
- Vikt: 480 gram (med batteri)

## Kompatibilitet

Kan styras trådlöst med t ex Simply Works *Kontaktsändare 125* Anpassad, batteridrivna leksak kan styras trådlöst med t ex Simply Works *Mottagare Enkel*

## Leverans

- Levereras i kartonglåda. Det ska ingå: 1 st Smooth Talker, batteri, kabel samt denna Snabbguide.
- 2 års garanti för fabriksfel. Smooth Talker är avsedd att användas i normal torr miljö - ej våtutrymmen. Aktas för regn.
  - Apparaten har inga delar som kan repareras av användaren.
  - Vid problem eller fel kontakta Rehabmodul AB.

## Batteriet, mm

- Vänd apparaten upp och ner och ta bort batteriluckan. (Skruvmejsel behövs.)
- Anslut ett 9 volt alkalinebatteri (6F22) till batterikontakten och sätt tillbaka och skruva fast batteriluckan.
- Ta ur batteriet om apparaten inte används 6-12 månader.
- Automatiskt avstängning efter 30 minuters inaktivitet. Tryck på manöverkontakten för att starta upp igen.
- Använd PÅ/AV tumhjulet (på baksidan) för vanlig avstängning.
- Om meddelandet avkortas vid utläsning och RECORD-LED blinkar snabbt, är det dags att byta batteri - se ovan!


## Komma igång

Orientera dig om knappars lägen och funktioner - på bilden till höger - innan du börjar.

Följande visas på bilden:

1. **RECORD**, dvs inspelningsknapp
2. **RECORD-LED**, lyser vid inspelning, blinkar vid låg spänning
3. Tumhjul, kombinerad PÅ/AV switch och volymkontroll
4. **SWITCH**, Anslutning av yttre manöverkontakt, 3,5 mm, mono
5. **APPL.**, Anslutning av leksak/ annan apparat, 3,5 mm, mono
6. Inbyggd manöverkontakt (MK)
7. **MODE**, knapp för att välja arbetssätt
8. **MODE-LED**, visar inställt arbetssätt
9. **PAIR** knapp - se bilagan!
10. **PAIR-LED** - se bilagan!
11. Inbyggd mikrofon

- På undersidan finns reglaget LOCK/UNLOCK. Normalläget är LOCK (låst). Det går att byta till en annan färg på MK's knapp-topp. Reglaget sätts då i läge

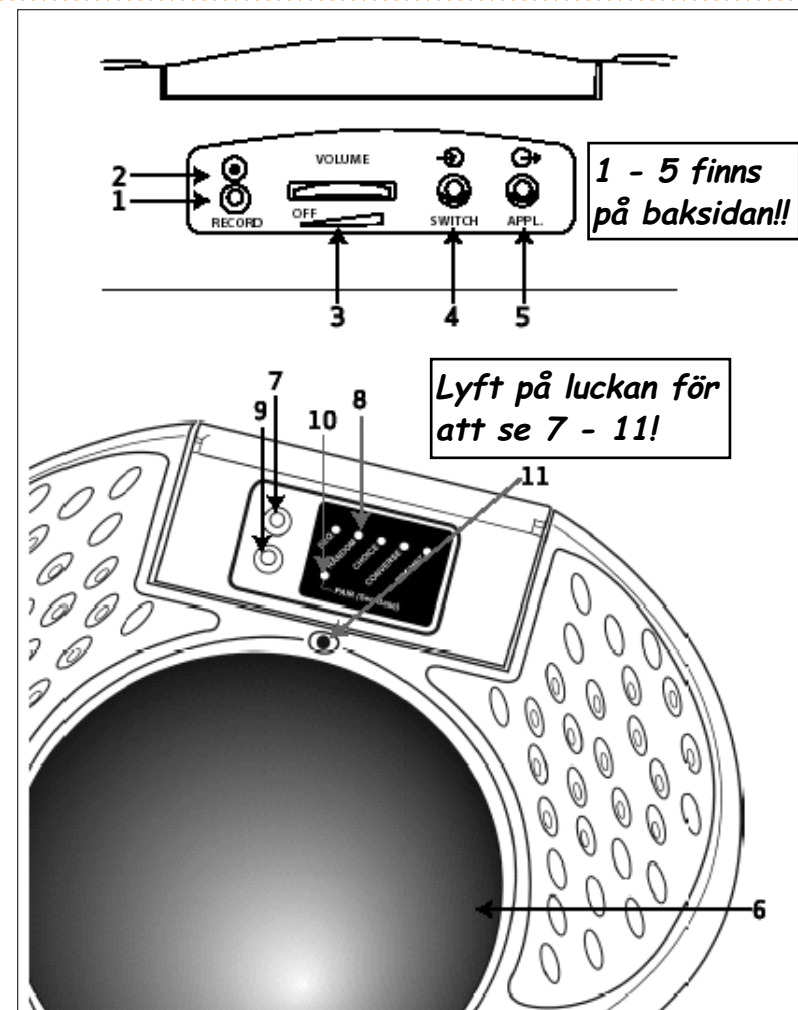

UNLOCK (olåst) och knapptoppen vrids moturs till stoppet och lyfts ur. Vid återmontering placeras toppen och vrids medurs till andra stoppet och reglaget sätts i läget LOCK igen.

Var god vänd!

**Avfallshantering**  
Förbrukat produkt ska hanteras som elektronikavfall.

## Inspelning

- Tryck in och håll RECORD (1) tills RECORD-LED (2) tänds. Släpp RECORD-knappen.
- Tryck och håll nere inbyggda manöverkontakten (MK) (6).
- Ett pip ljud hörs - tala in första meddelandet (mot mikrofonen) (11). RECORD-LED blinkar långsamt.
- Släpp MK när du talat färdigt - vänta lite, så du inte klipper.
- Tryck på MK igen för nästa meddelande och tala in.
- När inspelningarna är klara, tryck kort på RECORD-knappen.
- Nu kan utläsningar göras.

OBS! När 10 sek återstår av inspelningstiden, blinkar RECORD-LED snabbt. När tiden är helt slut avslutas inspelningen automatiskt.

## Radera allt


Efter gjorda inspelningar, som avslutats med att RECORD kort tryckts in, kommer apparaten att radera allt nästa gång den sätts i inspelningsläget med RECORD. Det går inte att ändra eller komplettera gjorda inspelningar.

## Yttre manöverkontakt

Vid behov, anslut en yttre manöverkontakt till uttaget SWITCH (4) på baksidespanelen. MK ska ha en aktivt slutande funktion, som är potentialfri (ingen spänning).

## Bildstöd

En bild kan sättas i hållaren, som är integrerad i panelluckan. Fäll upp luckan och placera ett kort med bredden 75 mm.

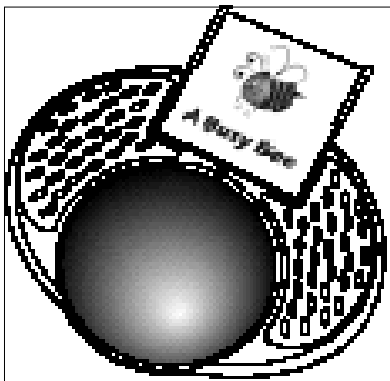

## Arbetsätten - MODE

Det finns fem olika arbetsätt  
att välja på vid utläsning:

SEQ - SEKVENSER

RANDOM - SLUMPVIS

CHOICE - VAL

CONVERSE - TURTAGNING

PROMPT - FÖRKONTROLL

*Lyft på luckan och:*

- Tryck på MODE-knappen (7) för att se vilket arbetsätt som är valt (se MODE-LED) (8).
- För att ändra, tryck på MODE-knappen upprepade gånger till önskat läge enligt MODE-LED, som kort senare släcks.

## Utläsning

### SEKVENSER (SEQ)

- Utläsningen startar med det första, inlästa meddelandet.
- Tryck på MK, alt. ansluten yttre MK, för att läsa ut. Tryck igen för nästa meddelande.
- När sista meddelandet lästs ut, återkommer första meddelandet.
- Volymen kan justeras med tumhjulet (3).
- Meddelande kan avkortas under utläsning genom att kort trycka på RECORD. Utläsningen fortsätter med nästa meddelande när MK trycks in nästa gång.
- Ett meddelande kan, om det inte är för kort, repeteras, om MK trycks in i slutet av en pågående utläsning. Meddelandet upprepas nu varje gång MK aktiveras.
- Tryck kort på RECORD för att gå till normala utläsningsläget.

OBS! Repetering fungerar endast i (detta) arbetsättet Sekvenser.

### SLUMPVIS (RANDOM)

- Random, dvs slumpvis väljer själv ut inspelade meddelanden (en i taget) var gång MK (alt. ansluten yttre MK) aktiveras.
- Om siffrorna 1 t o m 6 läses in kan SMOOTH TALKER användas som en talande tärning. Om en leksak ansluts, kan ett lämpligt inläst meddelande läsas ut när leksaken aktiveras. Se: Styra batteridrivna leksaker!

### VAL (CHOICE)

- Choice, dvs val, innebär att bara de två första inspelningarna används (ev. övriga ignoreras). Det kan t ex vara JA och NEJ.
- Både inbyggda MK och en yttre MK måste användas. En för vardera meddelandet.

### TURTAGNING (CONVERSE)

- Både inbyggda MK och en yttre MK måste användas, där vardera part har sin del i det inspelade ordförrådet. Inbyggda MK styr sedan meddelanden med udda nummer i inspelningsordningen resp. yttre MK de jämna. Denna ordning följs strikt.
- Spela först meddelanden på normalt sätt, enligt tidigare.
- Meddelande 1, 3, 5 osv är en del och 2, 4, 6 osv den andra delen. Använd gärna olika röster.
- För att sedan läsa ut, är det den inbyggda MK som börjar. Det måste inte vara exakt lika antal meddelanden. Udda kan avsluta.

### FÖRKONTROLL (PROMPT)

- Förkontroll av inspelade meddelanden kan göras med lägre volym.
- Yttre MK (alt. RECORD-knappen) används då för att stega fram och lyssna av. Hela meddelandet behöver inte avlyssnas.
- När rätt meddelande är framme används den inbyggda MK och utläsning görs med normal volym.
- Vid förnyade tryck på inbyggda MK upprepas samma meddelande.

## Styra anpassade, batteridrivna leksaker

- SMOOTH TALKER kan aktivera en anpassad, batteridrivna leksak.
- Anslut leksaken till uttaget APPL. (5). Kabel medföljer.
- Spela in ett lämpligt meddelande på normalt sätt - och medan inspelningen pågår - tryck kort på RECORD-knappen, vilket aktiverar denna funktion.
- Anslut leksaken och tryck på MK och leksaken aktiveras så länge talet pågår. (I vissa fall behöver leksaken bara en startpuls och kör sitt egna schema.)

*För att styra trådlöst, se bilagan!*

## Felsökning

*Felsökning, se bilagan!*

## Felsökning

### Ingen utläsning

- Inget meddelande- Spela in
- Volymkontrollen- Vrid upp
- Dåligt batteri- Byt batteri

### Utläsningen stannar och

#### RECORD-LED blinkar snabbt

- Dåligt batteri- Byt batteri

### Leksaken startar inte

- Ingen styrning aktiverad- Gör om inspelningen och medan inspelningen pågår - tryck kort på RECORD-knappen
- Kabelbrott- Prova och ev. byt
- Vid användning av Simply Works -Mottagaren inte anpassad (Pair)- Anpassa mottagaren

### Yttre MK startar inte utläsning

- Kabelbrott- Prova och ev. byt
- Vid användning av Simply Works -Kontaktsändaren inte anpassad (Pair)- Anpassa sändaren
- Inte din tur vid TURTAGNING- Vänta till dess det är din tur

### Samma meddelande upprepas

- Apparaten är i repeteringsläge- Tryck kort på RECORD mellan meddelandena
- Apparaten är i FÖRKONTROLL-läge- Ställ in ett annat arbetssätt med MODE

### Inspelningar störs av mekaniska (o)ljud


- Apparaten hålls i händerna under inspelning- Placera apparaten på ett fast underlag

## Trådlös styrning

### - Simply Works

## Anpassning (Pair)

Anpassning mellan Smooth Talker till Simply Works enheter görs med ett system av unika adresser. • För korrekt funktion, måste sändar- och mottagarkanal ha samma adress. Adresserna finns kvar även efter strömbortfall. Proceduren är automatiserad.

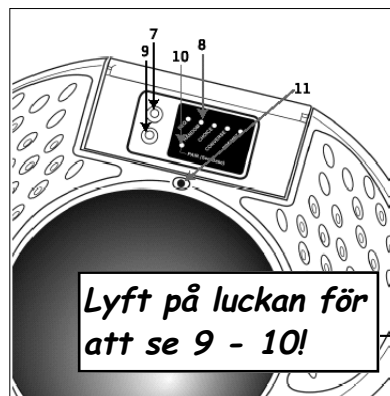

9. PAIR knapp

10. PAIR-LED

## Kontaktsändare 125 som yttre manöverkontakt

Istället för kabelansluten yttre MK, kan Kontaktsändare 125 användas, som ger trådlös funktion.

- Tryck och håll ner PAIR-knapp (9) på SMOOTH TALKER tills PAIR-LED (10) blinkar långsamt.
- Nu ska (omg.) PAIR-knappen på Kontaktsändare 125 tryckas ner.
- PAIR-LED på SMOOTH TALKER fortsätter att blinka långsamt tills anpassningen är klar och då lysa med fast sken i 5 sekunder.

### OBS!

- Förutom Kontaktsändare 125 kan även Simply Works SÄNDARE användas.
- Såväl kabelansluten som trådlös, yttre MK kan användas samtidigt och ger samma funktion.

## Styra anpassade, batteridrivna leksaker trådlöst

SMOOTH TALKER kan aktivera en anpassad, batteridrivna leksak.

- Spela in ett lämpligt meddelande på normalt sätt - och medan inspelningen pågår - tryck kort på RECORD-knappen, vilket aktiverar denna funktion.

- Anslut leksaken till valfri Simply Works MOTTAGARE, dvs modell Enkel, Standard eller PRO.

- Tryck på PAIR-knappen på MOTTAGAREN så att PAIR-LED (10) på SMOOTH TALKER blinkar långsamt.

- Tryck kort på PAIR-knappen (9) på SMOOTH TALKER.

- PAIR-LED på MOTTAGAREN fortsätter att blinka långsamt tills anpassningen är klar och då lysa med fast sken i 5 sekunder.

- Anslut leksaken med kabel till MOTTAGAREN och tryck på MK och leksaken aktiveras så

länge talet pågår. (I vissa fall behöver leksaken bara en startpuls och kör sitt egna schema.)

### OBS!

- Såväl kabelansluten som trådlös, förbindelse kan användas samtidigt och ger samma funktion.

## Styra dator/ datorprogram vid utläsning

SMOOTH TALKER kan även användas tillsammans med Simply Works MOTTAGARE USB, för att skicka en mus- eller tangentbordsfunktion till en USB-port.

- Kontakta oss för mer information om MOTTAGARE USB!

