

Rehabmodul AB Snabbguide Geemarc AMPLIDECT295 Photo

Telefon Geemarc AMPLIDECT295 Photo

För anslutning till analoga tele-
nätet eller bredbandsmodem
/router med telefonuttag

Artnr 2136


Storlek, handenhet : 170 x 52 x 20 mm
Vikt handenhet: 128 gram

Strömförsörjning med laddningsbara
batterier och adapter från elnätet


OBS! Det finns inga menyer på svenska!
Välj engelska, spanska, mfl. Komplet
original bruksanvisning på engelska, kan
laddas ned som pdf via länken:
[www.rehabmodul.se/katalogen/
amplidect295photo_bruks_eng.pdf](http://www.rehabmodul.se/katalogen/amplidect295photo_bruks_eng.pdf)

**OBS! Vid oklarheter -
Se original-bruksanvisningen!**

Handenhet
framsida

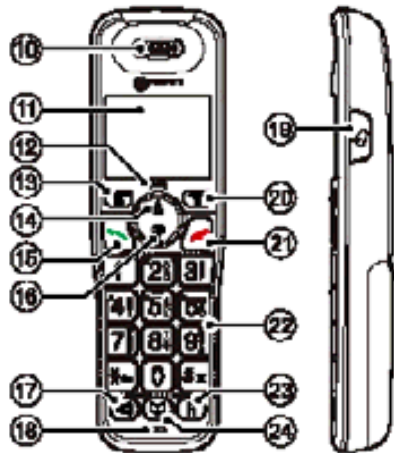

Inkoppling/start

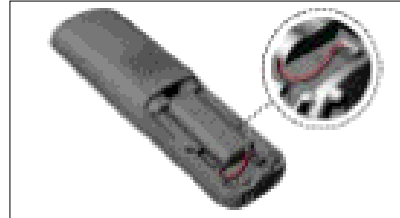


• Sätt i de medföljande laddnings-
bara batterierna i handenheten.
Se bilden ovan.

• På basenhetens undersida:

- Anslut nätadaptern till basen-
heten (C) och ett vägguttag (D).
- Anslut telesladden till ett tele-
jack/telefonuttag (B) på
modemet/routeren (*det måste
finnas ett abonnemang för
telefon*) och modularuttaget (A).
- Sätt handenheten på sin plats i
basenheten. Batterisymbolen på
skärmen visar att laddning pågår.
Laddning måste göras upp till 16
timmar för full kapacitet.
Laddningen är automatiskt
reglerad. Full kapacitet visas med
att alla fält är svarta. Laddning
sker automatiskt när handen-
heten är placerad i basenheten.
- Handenheten söker upp basen-
heten automatiskt så att för-
bindelse finns mellan enheterna.

Basenhet
ovansida

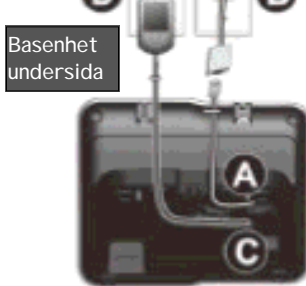

AMPLIDECT295 Photo tillverkas av
Geemarc Telecom SA, Frankrike.
CE-märkt. 2 års garanti för
materiel- eller tillverkningsfel.

Menyspråk

Svenska menyer finns inte. Du kan välja
engelska, franska, tyska, holländska,
italienska, spanska eller ryska. Om du är
nöjd med det valda språket (t ex engel-
ska) kan du hoppa över detta stycke.

1. Tryck på menyknappen (13).
2. Bläddra med (16) till *HS SETTING*.
3. Tryck på menyknappen (13).
4. Bläddra med (16) till *LANGUAGE*.
5. Tryck på menyknappen (13).
6. Bläddra med (16) för att välja språk,
t ex engelska. *Svenska finns inte.*
7. Tryck på menyknappen (13)
eller vänta 30 sekunder.

Översikt - Basenhet

- (1) **Hitta handenheten (HS)** - tryck på
knappen och handenheten piper.
Tryck igen för att stänga av.
- (2) **Indikator** som lyser med fast sken
när linje är uppkopplad. Blinkar vid
inkommande samtal.
- (3) **Bildknappar** för inlagrade nummer.
- (4) **Återuppringning** vid linje på resp, vid
vila **programmering av bildknappar**.
- (5) **Mikrofon**.
- (6) **Lyser när högtalaren är på**.
- (7) **Kopplar på högtalaren**, Vänta 2 sek.
innan du slår numret.
- (8) **resp. (9) Ökar resp sänker** högtalar-
volymen när linjen är på. I viloläge kan
ringsignalvolymen justeras.

Översikt- Handenhet

- (10) **Hörtelefon**.
- (11) **LCD skärm**.
- (12) **Laddningslampa** som lyser med fast
sken när handenhet står i basenheten.
- (13) **Menyknapp/OK**.
- I viloläge: Tryck för att komma in i
huvudmenyerna.
- Vid undermenyer: Tryck för att välja.
- Under samtal: Tryck för att komma åt
telefonbok/återuppringningslista/
samtalslista.
- (14) **Upp/samtalslista**.
- I viloläge: Tryck för att gå in listan.
- I menyäge: Tryck för att bläddra upp.
- I telefonboks-/återuppringnings-/
samtalslists läge: Tryck för att
bläddra upp.
- I redigeringsläge (EDIT): Tryck för att
flytta markören ett steg till vänster.
- Under samtal: Tryck för att öka ljud-
volymen.
- När det ringer: Tryck för att öka ring-
signalvolymen.
- (15) **Telefon på. (GRÖN LUR)**
- Tryck för linjetagning (kopplingston).
- I telefonboks-/återuppringnings-/
samtalslists läge: Tryck för att
ringa valt nummer i listan.
- När det ringer: Tryck för att svara.
- (16) **Ned/återuppringningslista**.
- I viloläge: Tryck för att gå in listan.
- I menyäge: Tryck för att bläddra ned.
- I telefonboks-/återuppringnings-/
samtalslists läge: Tryck för att
bläddra ned.
- I redigeringsläge (EDIT): Tryck för att
flytta markören ett steg till höger.
- Under samtal: Tryck för att sänka ljud-
volymen.
- När det ringer: Tryck för att sänka
ringsignalvolymen.

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras
som elektronikavfall.

(17) Högtalartelefon.

- Tryck för linjetagning - kopplingstonen hörs nu i högtalaren. Tryck igen för att gå över till hörtelefonen.
- I telefonboks-/återuppringsnings-/samtalslists läge: Tryck för att ringa valt nummer i listan. Tryck igen för att gå över till hörtelefonen.
- När det ringer: Tryck för att svara. Tryck igen för att gå över till hörtelefonen.

(18) Mikrofön.

(19) Volymförstärkning (Boost).

- Ökar/sänker hörtelefonvolymen när knappen trycks och linjen är på.

(20) Avbryt/sekretess (MUTE).

- I viloläge: Tryck för att komma tillbaka till huvudskärmen.
- Vid undermenyer: Tryck för att gå tillbaka till föregående meny.
- Vid undermenyer: Tryck och håll nere för att gå tillbaka till huvudskärmen.
- I redigeringsläge (EDIT): Tryck för att ta bort ett tecken.
- Under samtal: Tryck för att stänga av /sätta på mikrofonen.
- När det ringer: Tryck för att stänga av ringsignalen i handenheten.

(21) Telefon av. (RÖD LUR)

- Under samtal: Tryck för att avsluta samtal och tillbaka till huvudskärmen.
- I meny/redigeringsläge (EDIT): Tryck för att gå till föregående meny.
- I meny/redigeringsläge (EDIT): Tryck och håll nere för att gå till huvudskärmen.
- I viloläge: Tryck och håll nere för att stänga av handenheten, För att sätta på handenheten - gör samma sak.

(22) Alfanumeriska tangentbordet.

- X** - I viloläge: Tryck och håll nere för att aktivera/avaktivera knappläset.
- #** - I viloläge: Tryck och håll nere för att sätta på/stänga av ringsignalen.
- 0** - I viloläge, redigering av nummer: Tryck och håll nere för att sätta in en paus.

(23) R.

- Under samtal: Tryck för att svara på nytt samtal, om du har sådan tjänst.

(24) Telefonbok.

- I viloläge: Tryck för att gå in i boken.

Datum och tid

DATUMFORMAT

1. Tryck på menyknapp (13).
2. Bläddra med (16) till **DATE & TIME**.
3. Tryck på menyknapp (13).
4. Tryck igen på menyknapp (13). för att välja **DATE FORMAT**.
5. Tryck igen på menyknapp (13).
6. Bläddra med (16) för att välja **DD-MM-YY** eller **MM-DD-YY**.
7. Tryck på menyknapp (13) eller vänta 30 sekunder.

TIDFORMAT

1. Tryck på menyknapp (13).
2. Bläddra med (16) till **DATE & TIME**.
3. Tryck på menyknapp (13).
4. Tryck igen på menyknapp (13). för att välja **TIME FORMAT**.
5. Tryck igen på menyknapp (13).
6. Bläddra med (16) för att välja **12-Hour** eller **24-Hour**.
7. Tryck på menyknapp (13) eller vänta 30 sekunder.

STÄLLA IN DATUM OCH TID

1. Tryck på menyknapp (13).
2. Bläddra med (16) till **DATE & TIME**.
3. Tryck på menyknapp (13).
4. Bläddra med (16) till **SET DATE** eller **SET TIME**.
5. Tryck på menyknapp (13).
6. Med tangentbordet skrivs de aktuella siffrorna in.
7. Tryck på menyknapp (13) eller vänta 30 sekunder.

VISA TIDEN PÅ HUVUDSKÄRMEN

1. Tryck på menyknapp (13).
2. Bläddra med (16) till **HS SETTINGS**.
3. Tryck på menyknapp (13).
4. Bläddra med (16) till **HS DISPLAY**.
5. Tryck på menyknapp (13).
6. Bläddra med (16) till **TIME**.
7. Tryck på menyknapp (13) eller vänta 30 sekunder.

Ringa ett samtal

1. Lyft ur handenheten från basenheten.
2. Tryck på **GRÖN LUR**-knappen.
3. När kopplingston hörs, slå önskat telefonnummer på tangentbordet.
4. Avsluta med **RÖD LUR**-knappen.

ALTERNATIVT SÄTT:

1. Lyft ur handenheten från basenheten.
2. Slå önskat telefonnummer på tangentbordet.
3. Tryck på **GRÖN LUR**-knappen.
4. Avsluta med **RÖD LUR**-knappen.

FELSLAGNING AV SIFFROR:

- Tryck kort på Avbryt-knappen (20). för att radera en siffra. Slå ny siffra.
- Tryck på Avbryt-knappen (20) längre än 1 sekund för att radera alla siffror och återgå till viloläget.

JUSTERING AV LURVOLYMEN

- Under pågående samtal, tryck på knappen (16) för att justera ljudvolymen i luren - 5 steg.

Svara på samtal

Om tjänsten *nummerpresentation* finns visas uppringande nummer på skärmen.

1. Lyft ur handenheten från basenheten. och tryck på **GRÖN LUR**-knappen. Om autosvar är aktiv är det bara att lyfta ur handenheten.
2. Avsluta med **RÖD LUR**-knappen.

JUSTERING AV RINGSIGNAL:

- När det ringer, tryck på knappen (16) för att justera ringsignalstyrkan.

AMPLIDECT295 Photo har många funktioner, men det här ska vara en enkel Snabbguide för att komma igång. Beskrivning av t ex telefonsvararen kommer lite längre fram och kommer att finnas på vår hemsida, som PDF. Läs även gärna någon av de bifogade Snabbguiderna (engelska/franska/tyska)!

Högtalande telefon

Högtalande funktion kan aktiveras före och under ett samtal.

1. Tryck på knappen (17).
2. När kopplingston hörs, slå önskat telefonnummer på tangentbordet.
3. Avsluta samtal med **RÖD LUR**-knappen.
- Under pågående samtal: Tryck en gång på knappen (17) och samtalet återgår till lurens hörtelefon. Detta kan upprepas omigen.

Lagra snabbval

- Det finns 10 snabbvalsknappar med bilder i basenheten. Egna bilder kan ersätta de som finns med från början. (Skjut in en bild (pillrigt).)
- 1. Låt handenheten vara kvar i basenheten och tryck på knappen (4) i basenheten.
- 2. Slå numret med bildtangenterna som är märkta M0 - M9.
- 3. Tryck igen på knappen (4) i basenheten och därefter på den bildknapp där telefonnumret ska ligga.
- När ett telefonnummer lagras på en snabbvalsknapp, skrivs ett eventuellt befintligt nummer över.

Ringa med snabbval

1. Tryck på önskad bildtangent i viloläge. Kopplingston hörs. Numret slås nu automatiskt.
2. Lyft ur handenheten från basenheten.
3. Avsluta samtal med **RÖD LUR**-knappen.

Autosvar

Autosvar gör att inkommande samtal kopplas upp när handenheten lyfts upp.

1. Tryck på menyknapp (13).
2. Bläddra med (16) till **HS SETTING**.
3. Tryck på menyknapp (13).
4. Bläddra med (16) till **AUTO ANSWER**.
5. Tryck på menyknapp (13).
6. Bläddra med (16) för att välja **ON** eller **OFF**.
7. Tryck på menyknapp (13) eller vänta 30 sekunder.

Ringsignal

Det finns 10 ringtonssignaler att välja på.

1. Tryck på menyknapp (13).
2. Bläddra med (16) till **HS SETTING**.
3. Tryck på menyknapp (13).
4. Bläddra med (16) till **RING SETUP**.
5. Tryck på menyknapp (13).
6. Bläddra med (16) för att välja **EXT RING**.
7. Tryck på menyknapp (13).
8. Bläddra med (16) för att välja önskad ton/melodi (1-10).
9. Tryck på menyknapp (13) eller vänta 30 sekunder.

Ringsignalvolym

Det finns 5 signalernivåer samt avstängt.

1. Tryck på menyknapp (13).
2. Bläddra med (16) till **HS SETTING**.
3. Tryck på menyknapp (13).
4. Bläddra med (16) till **RING SETUP**.
5. Tryck på menyknapp (13).
6. Bläddra med (16) för att välja **RING VOLUME**.
7. Tryck på menyknapp (13).
8. Bläddra med (16) för att välja önskad nivå (1-5 + OFF).
9. Tryck på menyknapp (13) eller vänta 30 sekunder.